

ClearView GO


Gebruikershandleiding



Inhoud

Configuratie	32
1. Introductie.....	34
1.1. Over deze handleiding	34
1.2. Instructies voor gebruik.....	34
1.3. Wat zit er in de doos	34
2. Aan de slag	35
2.1. De ClearView GO openen	35
2.2. De ClearView GO sluiten	36
2.3. Camera posities	37
3. Knoppen.....	38
4. Sneltoetsen en functies	40
4.1. Lijn & Afdekken	40
4.2. Batterij status	41
4.3. HDMI UIT modus	41
4.4. Scrollen door de bevroren afbeelding.....	41
4.5. Energiebesparende modus.....	42
4.6. Selectie kleurmodus.....	42
4.7. Spiegelmodus & afstandsmodus	43
5. Menu	44
5.1. Menu navigatie.....	44
5.2. Menu opties.....	44
Kleurmodus.....	44
Vergrotingsfactor	45
LED helderheid	45
Reset.....	45
5.3. Meer instellingen	46
Taal	46
Scrollsnelheid	46
Knopvergrendeling	46
Persoonlijk & Openbaar.....	46
Energiebesparende modus	46
Technische specificaties.....	47
ClearView GO 15"	47
ClearView GO 17"	48
Veiligheid en regelgeving.....	49

Configuratie

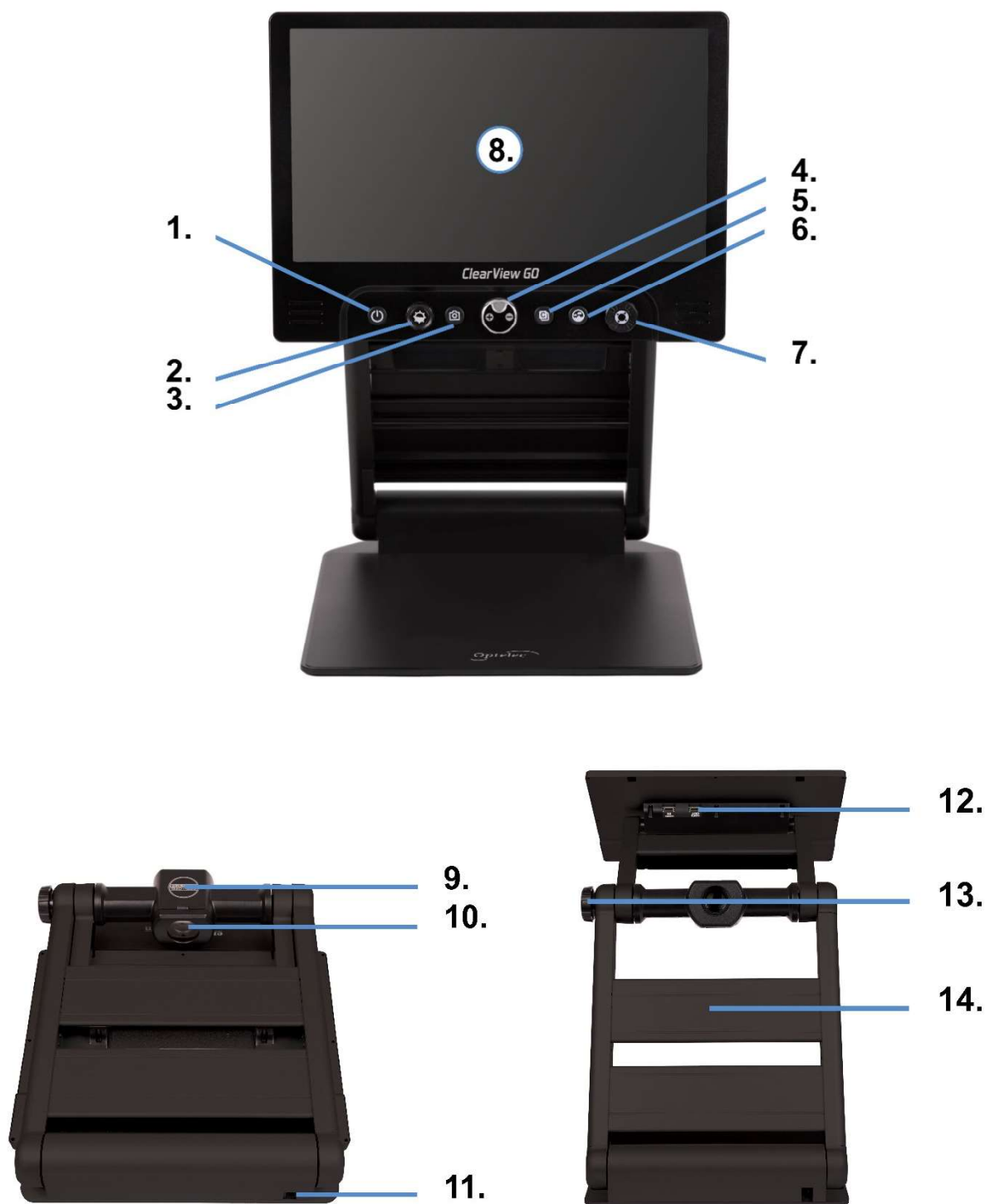

1. Aan-/ Uit knop
2. Beeldoptimalisatiewiel (aanpassen van helderheid en contrast)
3. Snapshot knop
4. Zoomwiel
5. Kleur modus knop
6. Natuurlijke kleur knop
7. Super Functietoets
8. LCD scherm
9. Camera
10. Close-up lens (open deze lens voor afstandswaergave)
11. DC aansluiting (sluit de voedingsadapter hier aan om de batterij op te laden)
12. HDMI uitgang
13. Camerapositioneringswiel
14. LED verlichting

Let op: zorg er bij de camera ⑨ voor dat er geen vreemd materiaal aan de cameralens kleeft. Als er vreemd materiaal op de lens zit, veeg dit dan af met de meegeleverde microvezeldoek.

1. Introductie

Gefeliciteerd met het kiezen van de ClearView GO. ClearView GO biedt hetzelfde leescomfort, gebruiksgemak en dezelfde functionaliteit als een tafemodel beeldscherm loep maar in een compact en opvouwbaar ontwerp. Het is de ideale oplossing voor mensen die vergroting op verschillende locaties nodig hebben. Met ClearView GO kunt u comfortabel tekst lezen en objecten bekijken, thuis, op kantoor, in de klas of onderweg. Het opvouwbaar ontwerp maakt het uiterst eenvoudig om de ClearView GO mee te nemen of op te slaan wanneer u deze niet nodig hebt.

1.1. Over deze handleiding

Deze handleiding helpt u vertrouwd te raken met de functies en bediening van de ClearView GO. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u uw ClearView GO gebruikt. Als u vragen of suggesties hebt over het gebruik van dit product, neem dan contact op met uw Optelec distributeur of het hoofdkantoor van Optelec door de contactinformatiepagina aan het einde van deze handleiding te raadplegen. We stellen uw feedback zeer op prijs. We hopen dat u veel plezier beleeft aan het werken met uw ClearView GO.

1.2. Instructies voor gebruik

De batterij moet volledig zijn opgeladen vóór het eerste gebruik. Sluit de meegeleverde voedingsadapter aan op de DC-ingang om de batterij op te laden. Tijdens het opladen brandt een rood lampje. Zodra er volledig is opgeladen, is het lampje groen.

Verwijder de LCD-beschermfolie voordat u het apparaat gebruikt. Zorg ervoor dat er geen vreemd materiaal aan de cameralens blijft kleven. Als er vreemd materiaal op de lens zit, veeg dit dan af met de meegeleverde microvezeldoek.

1.3. Wat zit er in de doos

De ClearView GO-verpakking bevat het volgende. Neem contact op met uw distributeur als een van deze items in uw pakket ontbreekt.

1. ClearView GO draagbare vergroter
2. Voedingsadapter
3. Draagtas (enkel 15" model)
4. Gebruikershandleiding
5. Microvezeldoek voor het reinigen van het beeldscherm

2. Aan de slag

2.1. De ClearView GO openen

1.



2.



3.



4.



5.



6.



1. Plaats de gevouwen ClearView GO op een stabiel oppervlak zoals een tafel.
2. Druk met één hand op de bodemplaat, terwijl de andere hand de bovenkant van het apparaat optilt.
3. Til de arm op totdat deze vastklikt.
4. Plaats de handen aan de linker- en rechterkant van het LCD-scherm.
5. Trek het LCD-scherm naar u toe.
6. Duw het LCD-scherm met beide handen omhoog en stel het in op een geschikte positie.

2.2. De ClearView GO sluiten



1. Plaats de handen aan de linker- en rechterkant van het LCD-scherm.
2. Druk het LCD-scherm met beide handen omlaag om de ClearView GO te sluiten.
3. Duw het LCD-scherm in de richting van het apparaat.
4. Plaats beide handen bovenop het apparaat.
5. Laat de bovenkant van het apparaat zakken totdat deze gesloten is.

2.3. Camera posities



U kunt tussen modi schakelen door aan het camerapositioneringswiel te draaien.

1. Lees modus
2. Afstandswaergavemodus (open de close-up lens voor afstandswaergave)
3. Spiegelmodus

3. Knoppen



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Aan/Uit knop

Druk deze knop 2 seconden in om het apparaat aan- of uit te schakelen.

2. Beeld optimalisatiewiel

Biedt verschillende functies:

- Draai de knop in de natuurlijke kleurenmodus om de helderheid van het scherm aan te passen (vijf niveaus).
- Draai de knop in een hoog contrast modus om het contrast van het beeld aan te passen. Druk de knop in om terug te keren naar de standaard instellingen.
- Druk de knop in en houd deze twee seconden ingedrukt om auto focus in- of uit te schakelen.

3. Snapshot knop

Druk kort op de Snapshot knop ③ om het beeld te bevrozen.

- U kunt vervolgens op het stilstaande beeld in- en uitzoomen en de kleur en helderheid van het scherm aanpassen.
- Wanneer het beeld vergroot is, kunt u door het beeld heen schuiven (pannen) door de Super Functietoets ⑦ te gebruiken.

Druk nogmaals op de knop om terug te keren naar de livemodus.

4. Zoomwiel

Draai aan de knop om de vergroting aan te passen. Het vergrotingsbereik hangt af van welke ClearView GO u bezit.

- ClearView GO 15":
Vergroting: 1.4x tot 20x, 2.0x tot 32x (standaard),
of 3.5x tot 60x.
Toegevoegde vergroting in een snapshot: 5.5x.

- ClearView GO 17":
Vergroting: 1.4x tot 25x, 2.3x tot 35x (standaard),
of 3.5x tot 70x.
Toegevoegde vergroting in een snapshot: 5.5x.

Verschillende vergrotingsfactoren kunnen in het Menu worden ingesteld. Druk het zoomwiel in en houd deze ingedrukt om toegang te krijgen tot het menu en selecteer het aan te passen vergrotingsbereik. Zie het onderdeel vergrotingsbereik in [hoofdstuk 5.2.](#) voor meer informatie over hoe dit te doen.

5. Kleur modus knop

Het beeld op het scherm kan worden bekeken in acht kleurmodi, de natuurlijke kleur modus en zeven hoog contrast kleuren:

- Natuurlijke kleur modus
- Witte tekst op zwarte achtergrond
- Zwarte tekst op witte achtergrond
- Gele tekst op zwarte achtergrond
- Zwarte tekst op gele achtergrond
- Groene tekst op zwarte achtergrond
- Blauwe tekst op gele achtergrond
- Gele tekst op blauwe achtergrond

Via het menu kunnen maximaal 35 kleurmodi worden ingesteld.

6. Natuurlijke kleur knop

Druk op de natuurlijke kleur knop ⑥ om foto's of documenten in natuurlijke kleur te bekijken.

Druk de natuurlijke kleur knop ⑥ in en houd deze ingedrukt om de Zoek functie te gebruiken tijdens het vergroten. De Zoek functie stelt u in staat snel uit te zoomen en het gehele beeld te zien. Loslaten van de knop keert terug naar de originele vergrotingsfactor.

7. Super functietoets

Gebruik deze knop om in de vergroting the schuiven(pannen) en scrollen over het stilstaande beeld. Zie [hoofdstuk 4.4.](#)

Deze knop wordt ook gebruikt voor de lijn/afdekfuncties. Zie [hoofdstuk 4.1.](#)


4. Sneltoetsen en functies

4.1. Lijn & Afdekken


Houd de Super Functietoets ⑦ ingedrukt om Lijn en afdekken te activeren of te deactiveren.

Wanneer Lijn en afdekken geactiveerd is, werkt de navigatietoets/wiel van de Super Functietoets ⑦ als volgt.

- Links en rechts ◀ ▶ : Kies de functie.

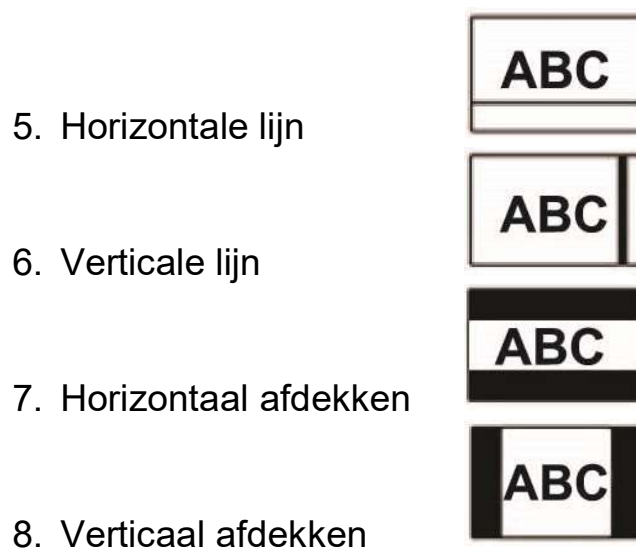


- Omhoog en omlaag ▲ ▼ : de dikte van een lijn en de afstand tussen het afgedekte gebied vergroten of verkleinen.

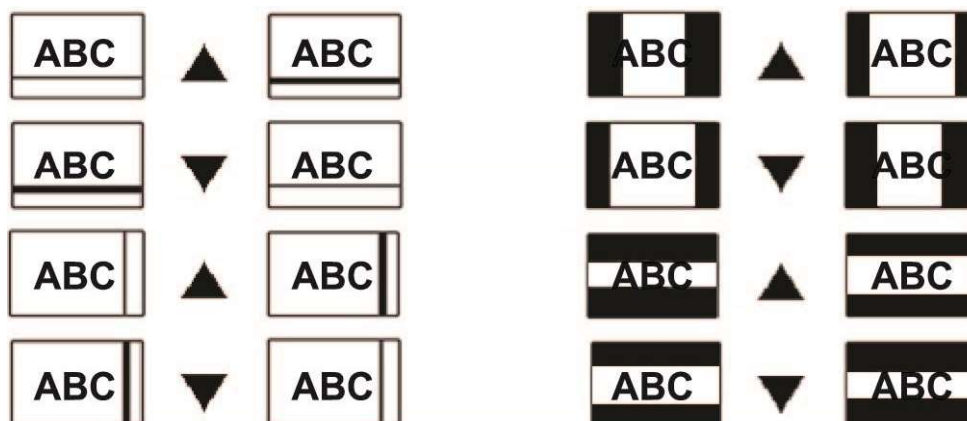


- Draai het wiel om de positie van de lijn of de afdekking te verplaatsen.

1) Tegen de klok in

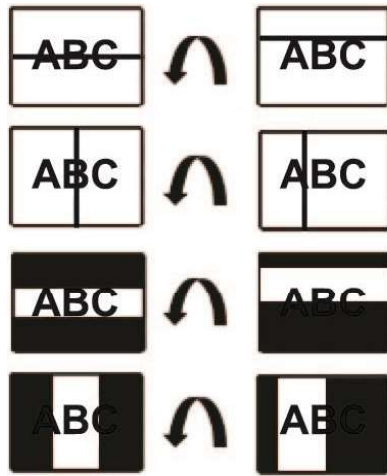

2) Met de klok mee

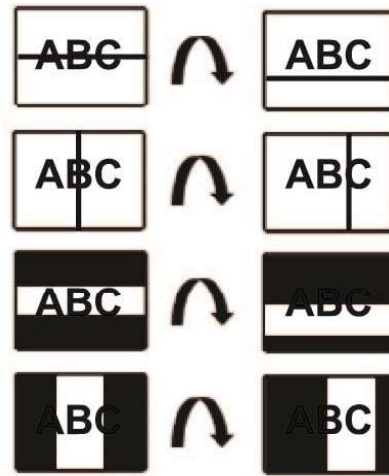

4.2. Batterij status

De status van het resterende batterijvermogen wordt niet continu weergegeven. Het pictogram voor het opladen van de batterij wordt weergegeven wanneer de voedingsadapter is aangesloten.

Druk de snapshot knop ③ minimaal drie seconden in om de status van het resterende batterijvermogen te controleren.

4.3. HDMI UIT modus

Bij het aansluiten van de HDMI-uitvoerkabel blijft het LCD-scherm leeg en wordt informatie weergegeven op een externe monitor.

U kunt schakelen tussen het LCD-scherm en een externe monitor door op de Super Functietoets ⑦ te drukken.

4.4. Scrollen door de bevroren afbeelding

Pas naar behoefte de vergrotingsfactor aan om het gehele gebied dat u wilt lezen te omvatten. Druk dan de snapshot knop ③ in om het beeld te bevroren.

Wanneer u het Zoomwiel ④ indrukt terwijl u in het stilstaande beeld bent, verschijnt een horizontale lijnmarkering. U kunt deze lijn verplaatsen door de Super Functietoets ⑦ te draaien.

U kunt op het stilstaande beeld in- en uitzoomen met het Zoomwiel ④. Wanneer het beeld vergroot is, kunt u over het stilstaande beeld schuiven door gebruik te maken van de omhoog/omlaag en links/rechts navigatietoetsen rondom de Super Functietoets ⑦. Als u schuift naar het eind van een stilstaand beeld, kunt u verder gaan met de volgende alinea of lijn door de linker of rechter navigatietoets los te laten en weer in te drukken.

Terwijl u over het beeld schuift kan uw huidige leespositie worden weergegeven door de Natuurlijke kleur knop ⑥ in te drukken. De locatie van het vergroot gebied wordt getoond binnen een volledig weergegeven beeld.

4.5. Energiebesparende modus

Wanneer u het apparaat 10 minuten ongebruikt aan laat staan zal het LCD scherm worden uitgezet om het batterijvermogen te sparen. Als het apparaat nog drie minuten extra ongebruikt blijft, wordt het automatisch uitgeschakeld. Zie de “Energiebesparende modus” sectie in [hoofdstuk 5.3](#) voor meer informatie over het aanpassen van deze tijden.

4.6. Selectie kleurmodus

Houd de kleurmodusknop ⑤ ingedrukt en draai aan het zoomwiel ④ om door de beschikbare kleurmodi te bladeren. Zie de “Kleurmodus” sectie in [hoofdstuk 5.2](#) voor meer informatie over hoe kleuren te selecteren.

- Kleurmodusknop ⑤ + zoomwiel ④, rechts: volgende kleur modus
- Kleurmodusknop ⑤ + zoomwiel ④, links: vorige kleur modus
- Druk de knop Kleurmodus herhaaldelijk in om te schakelen tussen de beschikbare kleuren modi.

4.7. Spiegelmodus & afstandsmodus

U kunt de weergave modus veranderen door de camera te verplaatsen met het camerapositioneringswiel ⑬.

Spiegelmodus

Gebruik wanneer de camera naar u toe gericht is.

- De camera schakelt automatisch over naar de spiegelmodus.
- Het vergrotingsbereik is geminimaliseerd.
- De camera schakelt automatisch over naar de natuurlijke kleur modus.

Afstandsmodus

Gebruik deze modus om een object op afstand te bekijken, zoals een schoolbord. Open de close-up lens wanneer deze modus gebruikt wordt.

- De camera schakelt automatisch over naar de Afstandswaergave modus.
- De vergrotingsfactor is geminimaliseerd.
- De camera schakelt automatisch over naar de natuurlijke kleur modus.

5. Menu

U gebruikt het menu om het product aan te passen. Deze sectie beschrijft hoe te navigeren door het menu en opties te selecteren om het uiterlijk en gevoel van uw ClearView GO aan te passen.

5.1. Menu navigatie

Houd het midden van het Zoomwiel ④ ingedrukt om het menu te openen en te sluiten. In het menu kunt u instellingen wijzigen of opslaan met behulp van het Zoomwiel ④ en de Super Functietoets ⑦.

- Navigeer door het menu door het Zoomwiel ④ of de Super Functietoets ⑦ te draaien.
- Selecteer een optie door het midden van het Zoomwiel ④ of de Super Functietoets ⑦ in te drukken.
- Houd het midden van het zoomwiel ④ of de Super Functietoets ⑦ ingedrukt om terug te keren naar het vorige scherm.

5.2. Menu opties

De volgende menuopties zijn beschikbaar: **Kleurmodus**, **Vergrotingsbereik**, **LED helderheid**, **Meer Instellingen**, en **Reset**.

Binnen het **Meer Instellingen** menu zijn de volgende opties beschikbaar: **Taal**, **Scrollsnelheid vastleggen**, **Knopvergrendeling**, **Persoonlijk & Openbaar**, en **Energiebesparende modus**.

Kleurmodus

Door gebruik te maken van de kleurmodus optie, kunt u uw voorkeurs hoogcontrast kleur combinaties toevoegen of verwijderen. De standaard is een selectie van zeven hoog contrast kleurmodi.

- Standaard: 7 kleurmodi geselecteerd
- Uitgebreid: alle 35 kleurmodi geselecteerd

Selecteer uw voorkeurs kleurmodi door gebruikt te maken van het Zoomwiel ④ of de Super Functietoets ⑦. Schakel een kleurmodus in of uit door het Zoomwiel ④ in te drukken. Een kleurmodus is ingeschakeld zodra deze rood omcirkeld is. Een kleurmodus is uitgeschakeld zodra deze grijs omcirkeld is. Druk **Opslaan** om de veranderingen toe te passen die u heeft gemaakt.

Vergrotingsfactor

Voor ClearView GO 15", is het standaard vergrotingsbereik 2.0x tot 32x. U kunt het vergrotingsbereik instellen op:

- 1.4x tot 20x
- 2.0x tot 32x
- 3.5x tot 60x

Voor ClearView GO 17", is het standaard vergrotingsbereik 2.3x tot 35x. U kunt het vergrotingsbereik instellen op:

- 1.4x to 25x
- 2.3x to 35x
- 3.5x to 70x

LED helderheid

Met deze optie kunt u de LED helderheid aanpassen in 11 verschillende niveaus, inclusief de verlichting volledig uitschakelen.

Reset

Dit menu zet alle instellingen terug naar standaard waarden.

5.3. Meer instellingen

Als u **Meer instellingen** selecteert, kunt u de volgende functies aanpassen: **Taal**, **Scrollsnelheid vastleggen**, **Knopvergrendeling**, **Persoonlijk & Openbaar**, en **Energiebesparende modus**.

Selecteer **Opslaan & Afsluiten** of druk het Beeldoptimalisatiewiel ② in en houd deze ingedrukt om uw aangepaste instellingen op te slaan.

Taal

Met dit menu kunt u uw voorkeurstaal selecteren.

Scrollsnelheid

Wanneer deze optie geselecteerd is kunt u de snelheid van het schuiven(pannen) en scrollen vastleggen. Of, gebruik het Beeldoptimalisatiewiel ②. U kunt de scrollsnelheid ter plekke testen met de Super Functietoets ⑦. Zorg dat u ingezoomd bent om de scroll snelheid te testen.

Knopvergrendeling

Als u **Ja** selecteert, zijn slechts drie toetsen beschikbaar: Zoomwiel ④, Kleurmodus knop ⑤, Natuurlijke kleur knop ⑥.

Als u **Nee**, selecteert, zijn alle knoppen beschikbaar.

Persoonlijk & Openbaar

In de **Persoonlijke** modus worden alle aangepaste gebruikersinstellingen onthouden nadat het apparaat is herstart.

In de **Openbare** modus worden alle instellingen teruggezet naar de standaard waarden nadat het apparaat is herstart. De Openbare modus wordt aangeraden wanneer een apparaat wordt gebruikt door meerdere personen, zoals in een bibliotheek.

Energiebesparende modus

Om de levensduur van de batterij te verlengen, kunt u de tijdsduur aanpassen waarna de LCD automatisch uitschakelt als het apparaat niet gebruikt wordt. U kunt ook de tijd aanpassen waarna het apparaat volledig uitschakelt. De standaard instellingen zijn:

- Automatische LCD uitschakel tijd is 10 minuten.
- Automatische uitschakel tijd is drie minuten.

Technische specificities

ClearView GO 15"

LCD Scherm Formaat	15.6 inches (396mm) 16: 9 wide screen
LCD Resolutie	1920 x 1080 (Full HD)
LCD rotatiehoek	180 graden
Camera Specificaties	1920 x 1080, 60 fps Auto focus
Afmetingen	Ong. 384 x 405 x 64 mm (gevouwen) Ong. 384 x 400 x 577 mm (in gebruik)
Licht gewicht	4.8 kg
Kleur modus	Standaard 8, inclusief natuurlijke kleur (Uitgebreid 35)
Vergrotingsbereik	Live camerabeeld: 1.4x tot 20x, 2.0x tot 32x (standaard), of 3.5x tot 60x. Extra vergroting in snapshot: 5.5x
Camera modus	Leesmodus, afstandsmodus, spiegelmodus
Batterij capaciteit	16.8V, 5200mAh
Batterij gewicht	400 g
Energie verbruik	14~20W (tijdens gebruik)
Batterij levensduur	5 uur
Input power rating - Adapter	100-240V, 50-60Hz, 1.7A
Output power rating - Unit	DC +19V-3.42A
Connectiviteit	HDMI UIT

ClearView GO 17"

LCD Scherm Formaat	17.3 inches (439mm) 16: 9 wide screen
LCD Resolutie	1920 x 1080 (Full HD)
LCD rotatiehoek	180 graden
Camera Specificaties	1920 x 1080, 60 fps Auto focus
Afmetingen	Ong. 411 x 432 x 64 mm (gevouwen) Ong. 411 x 445 x 653 mm (in gebruik)
Licht gewicht	5.465 kg
Kleur modus	Standaard 8, inclusief natuurlijke kleur (Uitgebreid 35)
Vergrotingsbereik	Live camerabeeld: 1.4x tot 25x, 2.3x tot 35x (standaard), of 3.5x tot 70x. Extra vergroting in snapshot: 5.5x
Camera modus	Leesmodus, afstandsmodus, spiegelmodus
Batterij capaciteit	16.8V, 5200mAh
Batterij gewicht	400 g
Energie verbruik	14~20W (tijdens gebruik)
Batterij levensduur	5 uur
Input power rating - Adapter	100-240V, 50-60Hz, 1.7A
Output power rating - Unit	DC +19V-3.42A
Connectiviteit	HDMI UIT

Veiligheid en regelgeving

- Onachtzaam gebruik of misbruik van het product kan brand, persoonlijk letsel of ernstige schade veroorzaken.
- Gebruik geen beschadigde stekker of ongeschikt stopcontact om elektrische schokken of brand te voorkomen.
- Raak de stekker niet aan met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.
- Misbruik van het product kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het apparaat.
- Gebruik alleen de adapter die bij het product is meegeleverd. Andere adapters kunnen het apparaat beschadigen.
- Gebruik dit apparaat niet in vochtige omgevingen zoals een badkamer of doucheruimte.
- Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.
- Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen, om te bouwen of te repareren. Dit kan het apparaat beschadigen en maakt de garantie ongeldig.
- Na zes (6) maanden gebruik kan de gebruiksduur van de batterij zijn verkort.
- Houd het product uit direct zonlicht en extreme temperaturen.
- Het display werkt mogelijk niet correct.
- De aanbevolen temperatuur ligt tussen 0 ~ 35 °C (32 ~ 95 °F)

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

- Volg alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies die op het product zijn aangegeven
- Gebruik ClearView GO op een stabiel, horizontaal oppervlak, zoals een stevig bureau of tafel, volgens de beoogde ontwerpspecificaties.
- Plaats ClearView GO niet op een onstabiele tafel, verschuifbare kar of standaard. Deze kan vallen, wat ernstige schade aan het apparaat of lichamelijk letsel kan veroorzaken.
- Gebruik ClearView GO alleen binnenshuis - het apparaat mag NIET worden blootgesteld aan extreme of snelle veranderingen in temperatuur of vochtigheid. Plaats ClearView GO niet in de buurt van een radiator, verwarming of gebieden die zijn blootgesteld aan lange uren direct zonlicht. Deze omstandigheden kunnen de elektronica of optica van het apparaat beschadigen.
- Reinig ClearView GO minimaal één keer per week met een zachte, droge doek of een elektrostatische stofdoek. Gebruik GEEN vloeibare reinigingsmiddelen op de plastic oppervlakken. Er worden geen aanvullende sterilisatie- of reinigingsmethoden aanbevolen of vereist.

- Gebruik ClearView GO niet in de buurt van brandbare materialen of vloeistoffen.

Veiligheid en zorg

Bekijk deze veiligheidsmaatregelen zorgvuldig om uw veiligheid te garanderen en het meeste voordeel uit ClearView GO te halen.

ClearView GO vergroot en verbetert tekst en objecten om de kwaliteit van leven van mensen met een visuele beperking te verbeteren. De mate waarin dit product het vermogen om afbeeldingen te zien kan verbeteren, hangt af van iemands individuele toestand en mate van visuele beperking.

ClearView GO is niet ontworpen om het gezichtsvermogen te herstellen, oogaandoeningen te corrigeren of degeneratief verlies van gezichtsvermogen te stoppen. Een oogzorgspecialist kan het nut en de geschiktheid van ClearView GO bepalen voor de individuele toestand van een patiënt.

Zorgen voor ClearView GO

Volg deze aanbevelingen om voor uw ClearView GO te zorgen:

- Als ClearView GO niet in gebruik is en niet is aangesloten op externe voeding, zet u de stroom altijd uit door de aan / uit knop twee seconden ingedrukt te houden.
- Zorg ervoor dat uw ClearView GO volledig is uitgeschakeld voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig ClearView GO met een zachte, droge doek of een elektrostatische stofdoek. Gebruik GEEN vloeibare reinigingsmiddelen op de plastic oppervlakken.
- Om de levensduur van ClearView GO te verlengen, verwijdert u de batterij uit het apparaat als deze een week of langer niet wordt gebruikt.
- Het beschermende glas dat de camera bedekt, kan indien nodig worden schoongemaakt met het lensdoekje dat in de verpakking van ClearView GO zit. Gebruik GEEN vloeibare reinigingsmiddelen op de plastic oppervlakken. Er worden geen aanvullende sterilisatie- of reinigingsmethoden aanbevolen of vereist.

ClearView GO vervoeren

Draag het apparaat wanneer het is opgevouwen door het ClearView GO-hoofdgedeelte stevig vast te pakken.

Waarschuwing: draag ClearView GO niet bij de camerakop, aangezien dit kan leiden tot schade aan uw apparaat.

De ClearView GO 15" wordt geleverd met een handige draagtas voor transport. Om te voorkomen dat het apparaat per ongeluk valt en beschadigd raakt, plaatst u de ClearView GO altijd in de draagtas wanneer deze niet in gebruik is. Koppel alle kabels los en berg ze op voordat u het apparaat verplaatst.

FCC-conformiteitsverklaring

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken. Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing aan radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat er in sommige gevallen geen interferentie zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt u aangemoedigd om te proberen de storing te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.

Ongeautoriseerde veranderingen of modificaties aan dit systeem kunnen uw bevoegdheid om dit apparaat te bedienen ongeldig maken.

Dit apparaat is een EMC-geregistreerd apparaat.



Dit apparaat draagt het CE- en FCC-keurmerk

Aanvullende mechanische veiligheidsmaatregelen

Je ClearView GO heeft bewegende delen. Probeer de onderdelen niet geforceerd te verplaatsen of aan te passen. Dit kan schade aan het apparaat veroorzaken.

Opmerking: wees voorzichtig bij het verplaatsen van onderdelen of bij het vervoeren van de ClearView GO om mogelijk letsel aan handen en vingers te voorkomen.

Gevoeligheid voor interferentie

Het beeld kan tijdelijk verslechteren wanneer ClearView GO wordt blootgesteld aan een sterk radiofrequentieveld, elektrostatische ontlading of voorbijgaande elektrische ruis. Door een elektrostatische ontlading (veroorzaakt door statische elektriciteit) kan het scherm zwart worden. Als dit gebeurt, volg dan deze stappen:

1. Koppel de voeding van de gelijkstroomadapter los van het stopcontact.
2. Wacht 30 seconden.
3. Sluit de voeding van de DC-adapter opnieuw aan.

Aanvullende elektrische veiligheidsmaatregelen

Lees deze veiligheidsmaatregelen voordat u ClearView GO gebruikt:

- Bij gebruik van een andere voeding dan die van Optelec voor ClearView GO vervalt de garantie.
- Als u gelijkstroom gebruikt, moet het ClearView GO-apparaat zich in de buurt van een gemakkelijk toegankelijk stopcontact bevinden.
- Gebruik ClearView GO niet in, bij of rond water. ClearView GO is niet ontworpen om bescherming te bieden tegen contact met vloeistoffen van welke aard dan ook.
- Gebruik alleen de voeding die bij uw ClearView GO is geleverd. Het gebruik van niet-geautoriseerde voedingen kan ernstige schade toebrengen aan de elektronische componenten van ClearView GO.
- Plaats het netsnoer altijd uit de buurt van looproutes om schade aan de voeding te voorkomen.
- Voorkom het risico op elektrische schokken door NIET te proberen het apparaat te demonteren. Laat alle service over aan een geautoriseerde reparatie-instelling.
- Zorg ervoor dat u alle juiste kabelaan sluitingen maakt.