



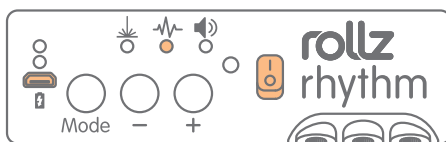

Rollz Motion Rhythm

Gids van de module en app

-  **LASER**
-  **VIBRATIE**
-  **GELUID**

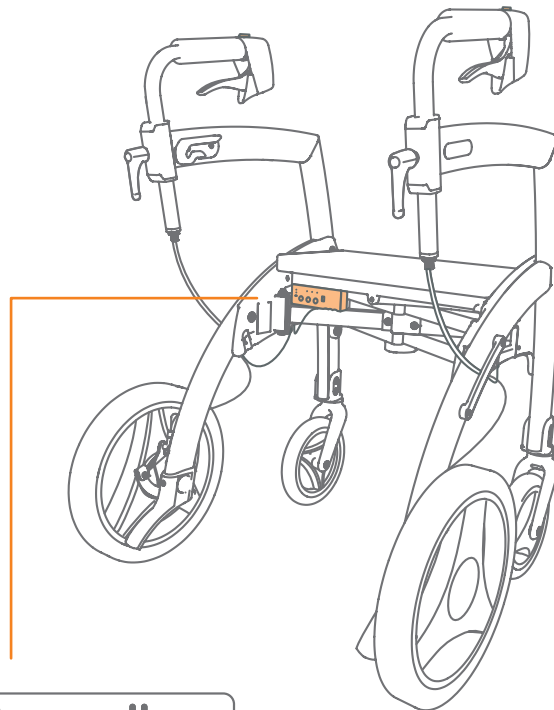

VOOR U BEGINT

Deze uitleg is een aanvulling op de Rollz Motion gebruikshandleiding.

U kunt de Rollz Rhythm module instellen en gebruiken op twee manieren: via de module op de rollator en/of via de app.



LET OP!

De Rollz Motion Rhythm bevat elektronische onderdelen. Voorkom daarom dat deze rollator doornat wordt. Gebruik deze niet buiten bij zware regenval.

Gebruik alleen de meegeleverde micro USB-lader om de module op te laden.

TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE MODULE

Werktemperatuur: -5°C tot +45°C


Nominale spanning en stroom: 5V DC - 0,5A

Batterijcapaciteit: (1S2P) 5200mAh

Draadloze verbindingsfrequentie: 2.4GHz - 2.5GHz

OPLADEN VAN DE ROLLZ RHYTHM MODULE

Zorg altijd dat de module is opgeladen voor gebruik. Om te laden, gebruik de meegeleverde micro USB-lader. De USB-aansluiting is aan de linkerkant van de module te vinden.

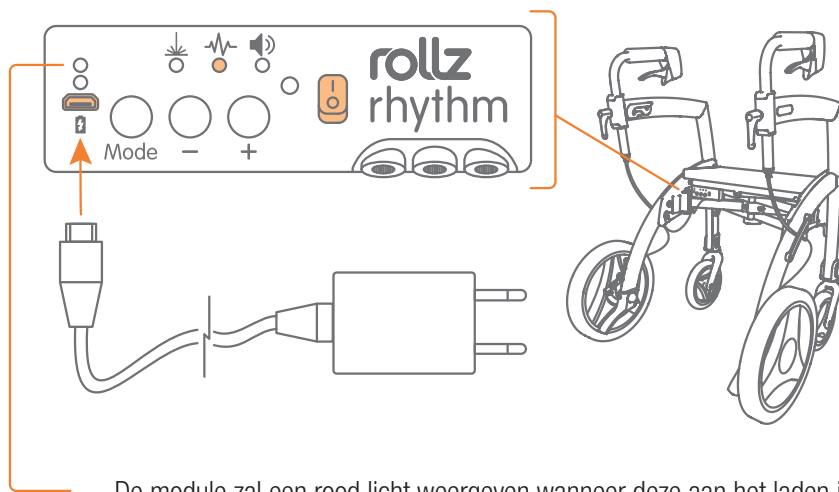

De module zal een rood licht weergeven wanneer deze aan het laden is, dit licht wordt groen wanneer deze volledig is opgeladen. Gebruik geen lader met een vermogen groter dan 5V en 1A.

Batterijverbruik hangt af van het gebruik van de module. Er kan tussendoor altijd worden bijgeladen.

Let op: wanneer de batterij leeg is en het apparaat niet langer kan opstarten, is dit te zien aan de middelste led die bij het inschakelen één maal aan gaat.



DE ROLLZ APP INSTALLEREN

De Rollz app kan gratis worden gedownload op uw smartphone of tablet in de Play Store (voor Android) of in de App Store (voor iOS). Zoek naar "Rollz".




Rollz



BEDIENING VAN DE MODULE OP DE ROLLATOR

Schuif de schakelaar omhoog om de module aan te zetten. Het kan enkele seconden duren voordat de module volledig is opgestart.

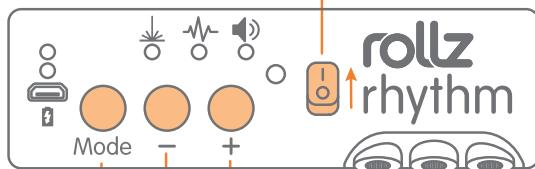

Gebruik de “-” en “+” knoppen om de loopfrequentie te vergroten of te verkleinen: het gaat om stappen per minuut. Voor een verhoging in loopsnelheid, kies “+”. Voor een vertraging in loopsnelheid, kies “-”.

Gebruik de “Mode” knop om door de verschillende cue-opties te gaan. De leds geven aan welke keuzes geselecteerd zijn.




- | | | | |
|---|---|---|-------------------|
| ● | ● | ● | Alle opties |
| ● | ○ | ○ | Laser |
| ○ | ● | ○ | Vibratie |
| ● | ● | ○ | Laser & vibratie |
| ○ | ○ | ● | Geluid |
| ● | ○ | ● | Laser & geluid |
| ○ | ● | ● | Vibratie & geluid |

Houd de “-” en “+” twee seconden tegelijk ingedrukt om naar de fabrieksinstellingen terug te keren: Alle cue-opties aan, gemiddelde intensiteit, 16 herhalingen.

Meer uitgebreide instellingen zijn beschikbaar in de Rollz app.

CUES STARTEN TIJDENS HET LOPEN


Druk kort op de linker- of rechterknop op de handgrepen om de ingestelde cues te starten. Druk nogmaals kort op de knop om te stoppen.

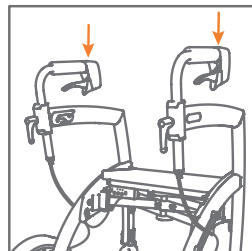

VERBINDING MAKEN MET DE MODULE

(met de app)

Zet de module op de rollator
aan en open de Rollz app om
verbinding te maken.

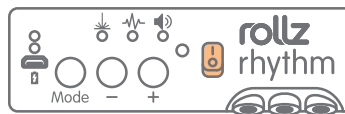

rollz
motion
rhythm

De module kan verbinding maken met uw smartphone of tablet via Bluetooth.
Wanneer de app geopend wordt, moet er een aantal stappen doorlopen worden
om verbinding te maken.


Let op: Het wachtwoord van de
module is: **123456**

Klik op de **BLUETOOTH
INSCHAKELEN** toets

SCAN voor apparaten

Kies het apparaat met de
naam "RollzRhythm"

Klik op **VERBINDEN**

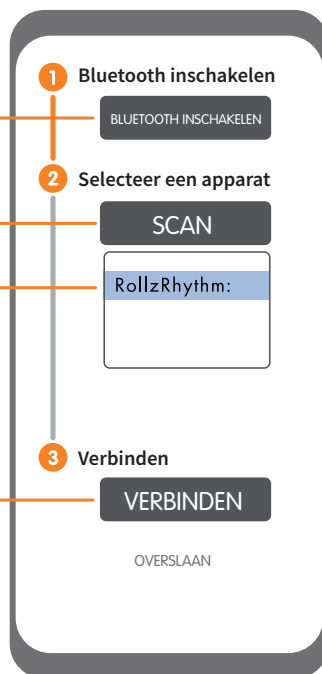

Wanneer de module succesvol is verbonden, zal dit worden weergegeven met een
“verbonden” symbool in de rechter bovenhoek van de app. Nu zullen op de module
ook de leds van ingeschakelde cues knipperen.

GEBRUIK VAN DE ROLLZ APP

Met de app kunt u meer opties instellen dan via de module.

Klik om te activeren/deactiveren


1. Laser
2. Vibratie
3. Geluid
4. Trilling/geluid op de telefoon

Klik om trilling en/of geluid op de smartphone te activeren dan wel deactiveren

Instellingen voor intensiteit van het geluid

De lengte van het cue-patroon instellen voor 8, 16, 32 stappen of continue herhaling.

Scroll naar beneden in de app om elke stap afzonderlijk aan te passen voor de respectievelijke cues. Tik om elke stap te activeren / deactiveren.

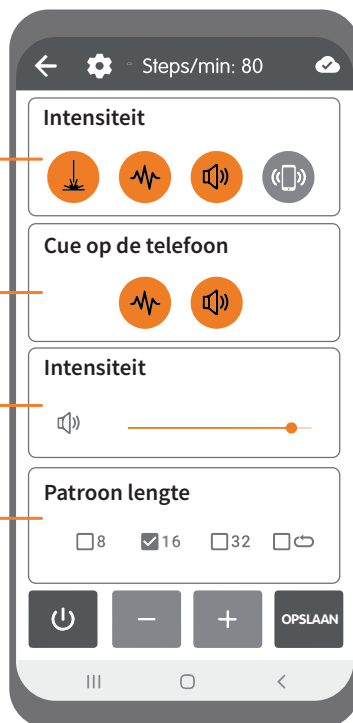


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	All	
	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Laser
	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Vibratie
	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Hoge toon
	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Lage toon

Wanneer de gewenste instellingen zijn ingevuld, klik **OPSLAAN**. De Rollz Rhythm module geeft nu een voorbeeld van het patroon en de ingestelde waarden.

NB: Wijzigingen in de app worden pas uitgevoerd nadat op **OPSLAAN** is geklikt.

Klik op “-” of “+” om de loopfrequentie aan te passen. De verandering in loopfrequentie is te zien aan de waarde voor het aantal stappen per minuut, boven aan het scherm. Druk na elke aanpassing weer op **OPSLAAN**.

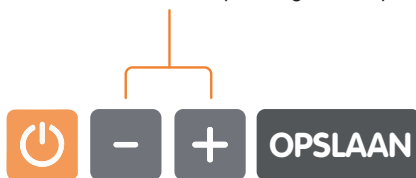

De module is ook op afstand te bedienen. Druk op de aan/uit-knop om het patroon te starten. Druk nogmaals om te stoppen.

Note: Update de app wanneer er een nieuwe versie beschikbaar is.

PRIVACY BESCHERMING

Rollz International gaat zorgvuldig om met uw privacy. Al uw instellingen worden opgeslagen in de module op uw rollator en op uw eigen smartphone of tablet.

GARANTIE

Voor uw Rollz Motion Rhythm rollator gelden de garantievoorwaarden uit de Rollz Motion gebruikshandleiding. Voor de specifieke onderdelen van uw Rollz Motion Rhythm gelden de volgende garantieperiodes:

1. Voor de Rollz Rhythm module geldt een garantieperiode van 24 maanden.
2. Voor de handvaten van de Rollz Motion Rhythm met het vibrerende onderdeel geldt een garantie van 12 maanden.
3. Voor de batterij in de Rollz Motion Rhythm module geldt een garantieperiode van 12 maanden.

ACCESSORIES

De Rollz Motion Rhythm wordt geleverd als rollator. Wilt u er onderweg een rolstoel van kunnen maken, dan kunt u het rolstoelpakket aanschaffen. Alle Rollz Motion accessoires passen ook op de Rollz Motion Rhythm.

GEBRUIKERSTIPS

Tips voor het optimaal gebruik van uw rollator vindt u op **www.rollz.com**.



Rollz® International BV

Treubweg 51bg
1112 BA DIEMEN
Nederland

020-362 2010
www.rollz.com
info@rollz.com

V 2020.06