



handleiding

aspirator Aspira Go30

Bedankt om via Goed een aspirator te ontlenen. In deze handleiding vind je alle aanwijzingen en tips om dit toestel correct, veilig en hygiënisch te gebruiken. De Aspira Go30 is een professionele, draagbare aspirator. Het toestel wordt gebruikt bij personen die moeite hebben met het ophoesten van slijmen of bij wie vloeistoffen uit de luchtwegen verwijderd moeten worden.




in de verpakking

1. het toestel aspirator Aspira Go30
2. bokaalhouder
3. adapter met laadkabel

goed
thuiszorgwinkel

zelf aan te kopen toebehoren

1. slangenset
2. opvangbokaal
3. filter
4. sondes (optioneel)
5. fingertip control connector (optioneel)

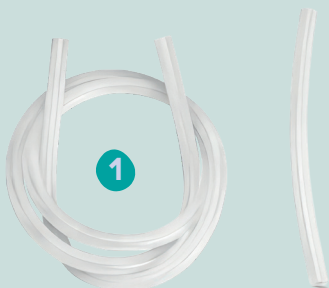

zo sluit ik het toestel aan

Stap 1: Schuif de bokaal in de bokaalhouder aan de linker- of rechterzijde van het toestel.



Stap 2: Haal de filter uit de verpakking en verbind hem met de uitgang van de opvangbokaal waar 'VACUUM' bij staat. Let er hierbij op dat de tekst 'LATO ASPIRATORE – ASPIRATOR SIDE' omhoog staat (= naar het toestel gericht is).




Stap 3: Verbind de korte darm van de filter met de aansluiting van het toestel waar 'INLET' bij staat.




Stap 4: Verbind de lange darm van de uitgang 'PATIENT' van de bokaal naar de fingertip connector.



tips bij gebruik

 Gebruik de aspirator altijd in overleg met een zorgprofessional. Je arts, verpleegkundige of kinesist bepaalt de gewenste druk in functie van jouw individuele symptomen.

 Laat nooit water in de bokaal staan na het aspireren. De hydrofobe filter kan het verdampende water opzuigen en blokkeren. Spoel na elk gebruik de bokaal grondig uit en droog die netjes af.

ingebruikname van de aspirator

1. Schakel het toestel in. Je zal merken dat de drukmeter niet onmiddellijk omhooggaat. Dat is normaal. De druk wordt pas opgebouwd als er een blokkage van de luchtstroom is. Bijv. bij het opzuigen van slijmen
2. Stel de druk in die met de zorgprofessional is afgesproken. Eens die is ingesteld, zal de druk de volgende keren slechts beperkt bijgeregeld moeten worden. Draai de zwarte regelknop in wijzerzin om de druk te verhogen en in tegenwijzerzin om de druk te verlagen.
3. Was eerst goed je handen of trek handschoenen aan vooraleer je de steriele aspiratiesondes vastneemt.
4. Open de verpakking van de sonde en sluit de fingertip connector op de sonde aan.
5. Aspireer nu met de techniek, die je door de zorgprofessional is aangeleerd.
6. Eindig met het opzuigen van wat water om de leidingen te spoelen. Zo vermijd je dat er kleverige slijmen in de sondes achterblijven, die de volgende keer voor blokkages kunnen zorgen.
7. Trek je handschoenen uit.
8. Neem bij het uittrekken van de handschoenen de aspiratiesonde in je hand. Zo kan je die in de omgekeerde handschoen veilig wegwerpen.



onderhoud


Het toestel vraagt weinig onderhoud. Toch hou je best met volgende zaken rekening:

- Gooi na het aspireren je handschoenen en de aspiratiesonde weg. Gebruik elke keer een nieuwe aspiratiesonde.
- Maak de aspiratiebokaal na elk gebruik leeg: spoel de bokaal met warm drinkwater (ongeveer 40°C of in de vaatwasser op een warm programma) uit en droog hem goed af. Vermijd dat er vocht in de bokaal blijft staan. De filter is hydrofoob en kan door het verdampende water gaan zwellen, waardoor hij de luchtflow kan afsluiten.
- Zorg dat de roosters op de achterkant van het toestel bij gebruik vrij blijven.
- Aangezien het toestel lichaamsvocht opzuigt, raden we aan om het toestel regelmatig met een licht vochtige doek met een antibacterieel reinigingsmiddel (niet schurend en zonder oplosmiddel) proper te wrijven. Zo vermijd je dat er resten achter blijven en bacterievorming kan ontstaan.

Wat als het niet (zo goed) lukt?

Het toestel moet een vacuüm kunnen opwekken om goed te werken. Als je merkt dat er onvoldoende vacuüm is of er onvoldoende slijm weggezogen kan worden, kan dat verschillende oorzaken hebben:

- Breng je de sonde op de correcte manier in? Consulteer je professionele zorgverstrekker (arts, verpleegkundige, kinesist, ...) om dat nog eens samen te overlopen.
- Is de druk correct ingesteld? Centraal op het toestel zit een zwarte draaiknop, waarmee je de druk kan regelen. Draai de knop in wijzerzin om de druk te verhogen en in tegenwijzerzin om de druk te verlagen.
- Zijn de toebehoren correct aangesloten? Als dat niet het geval is, zal het toestel onvoldoende vacuüm kunnen opbouwen. Verwijder de toebehoren en sluit ze opnieuw correct (en luchtdicht) op het toestel aan.
- Gaat de wijzer op de manometer niet onmiddellijk omhoog als je het toestel inschakelt? Dat is normaal. De druk wordt pas opgebouwd als er een obstructie van de luchtstroom is. Dat gebeurt dus pas als je op een slijmprop stuit.

 **je kan zelf testen of het toestel voldoende druk opbouwt door de sonde even af te sluiten. De naald moet dan op vol vermogen makkelijk tot 70-80kPa gaan. Is dat niet zo? Breng het toestel dan samen met de toebehoren terug naar de Goed thuiszorgwinkel. We zoeken dan even met jou uit hoe we het probleem kunnen oplossen.**

Goed thuiszorgwinkel

 goed.be
 03 205 69 29

 [uitleendienst](https://goed.be/uitleendienst)

 goed.be/uitleendienst

 **onze webshop is altijd open**

Bestel en reserveer 24/7 op goed.be/webshop.
Haal je bestelling af bij Goed of laat ze thuis leveren.

goed
samen sterk in het leven