



Exelle
Gebruikershandleiding | Nederlands

Bepaalde foto's en/of afbeeldingen in deze handleiding kunnen andere producten tonen dan waarnaar wordt verwezen.

Alle instructies zijn echter relevant, ongeacht verschillen in producten.

De gehele en gedeeltelijke reproductie van deze handleiding is verboden zonder schriftelijke toestemming van Rehateam s.r.l.

Gemaakt en gepubliceerd door Permobil

Versie: 0.1

Datum: 2024-12-18

Bestelling nr: nld-NL

1	INLEIDING	6
2	BRANDWERENDE EIGENSCHAPPEN, SYMBOLEN	7
2.1	BRANDWERENDE EIGENSCHAPPEN	7
2.2	SYMBOLEN	7
3	PRODUCTETIKET	8
4	BEDOELD GEBRUIK EN GEBRUIKSVOORWAARDEN	9
5	INBEDRIJFSTELLING EN GEBRUIK	11
5.1	ALGEMENE INFORMATIE	11
5.2	BANDENSPANNING	13
5.3	REMMEN	14
5.4	TYPEN REMMEN	16
5.4.1	Gebogen duwremhendel	16
5.4.2	Rechte duwremhendel	16
5.4.3	Rechte trekremhendel	17
5.4.4	Rem met verlengde trek- of duwhendel	17
5.4.5	Rem "sport"	18
5.5	ACHTERWIELEN MET SNELOONTKOPPELING	19
5.6	DE ROLSTOEL UIT- EN INKLAPPEN	20
5.6.1	Uitklappen	21
5.6.2	Opklappen	22
5.7	VOETSTEUN	22
5.7.1	Algemene informatie	22
5.7.2	Gespleten voetsteun	24
5.7.3	Optilbare enkele voetsteun van plastic	24
5.7.4	Enkele voetsteun van aluminium	24
5.7.5	Optilbare enkele voetsteun van koolstofvezel	25

5.7.6	Automatisch inklappende enkele voetsteun van plastic	25
5.7.7	Automatisch inklappende enkele voetsteun van aluminium	26
5.8	KUITBAND	26
5.9	AANSPANBARE RUGLEUNING	27
5.10	ARMLEUNINGEN	27
5.10.1	Algemene informatie	27
5.10.2	Buisvormige arMLEUNINGEN met standaardsteun	29
5.10.3	Buisvormige arMLEUNINGEN met stalen steun	31
5.10.4	Armleuning Desk Progeo	33
5.10.5	Armleuning Flip-up Progeo	34
5.10.6	Afneembare armleuning	37
5.11	KLEDINGBESCHERMERS	38
5.12	BEVESTIGING VAN DE DELEN EN LEVENSDUUR VAN DE ROLSTOEL	39
5.12.1	Bevestiging van de delen	39
5.12.2	Levensduur van de rolstoel	39
6	VEILIGHEID	40
6.1	ONGEVALLEN VOORKOMEN	41
6.1.1	Bewegingen	41
6.1.2	Gebruikssnelheid	41
6.1.3	Gebruik van de remmen	41
6.2	BEWEGINGEN: DE ROLSTOEL IN- EN UITSTAPPEN	42
6.3	BEGINNEN MET RIJDEN IN UW ROLSTOEL	44
6.4	OBSTAKELS OVERWINNEN: TRAPPEN EN HOOGTEVERSCHILLEN	45
6.4.1	Zelf een tree afdalen en beklimmen	46
6.4.2	Met een begeleider een tree afdalen en beklimmen	47

6.5	HELLINGEN EN BEKLIMMINGEN	49
6.6	OVERWINNEN	50
6.6	ZOEKEN NAAR STABILITEIT	50
7	VERVOER VAN DE ROLSTOEL	54
7.1	VERVOER VAN ROLSTOEL MET	
	PERSOON	55
7.2	VERVOER MET AANWEZIGHEID VAN EEN	
	BEGELEIDER	55
7.3	VOLLEDIG ZELFSTANDIG DE ROLSTOELEN	
	LADEN	56
8	BESCHRIJVING VAN DE	
	ONDERDELEN	57
9	VERSTELLINGEN	58
9.1	ALGEMENE INFORMATIE	58
9.2	MOGELIJKE VERSTELLINGEN	59
10	ACCESSOIRES	60
10.1	ALGEMENE INFORMATIE	60
10.2	WIELEN VOOR SMALLE DOORGANGEN	60
10.3	KANTELBSCHERMINGSWIEL (met stalen	
	steun)	61
10.4	DUWHANDGREPEN VOOR BEGELEIDER	63
10.5	KANTELHULP	64
10.6	KRUKKENHOUDER	64
10.7	OPKLAPBARE HANDGREPEN	65
10.8	TETRACLIP	65
10.9	ACHTERWIELTERUGZETPLAAT	67
10.10	TAFELTJE	68
10.11	HEUPRIEM EN HARNASRIEM	69

10.12	ONDERRUGSTEUN	71
10.13	HOOFDSTEUN	72
10.14	ZIJWAARTS DUWELEMENT	73
10.15	ACHTERWIELEN	73
10.15.1	Algemene informatie	73
10.15.2	Wielen Spinergy Flexrim	74
10.15.3	Wielen Off-road	74
10.15.4	Wielen Fat-wheel	74
10.15.5	Wielen met enkele geleider	75
10.15.6	Wielen 22" en 24" met trommelrem	76
10.16	LEUNING	77
10.17	BANDEN	78
10.18	SPAKENBEDEKKING	78
10.19	VOORWIELEN	79
10.20	FASTBINDFLAP	80
10.21	AFNEEMBARE TAS	80
10.22	STOOTKUSSEN	81
11	ONDERHOUD	82
11.1	VERVANGING VAN AAN SLIJTAGE	
	ONDERHEVIGE ONDERDELEN	83
11.1.1	Reparatie van een band	83
11.1.2	Reserveonderdelen	83
11.2	CONTROLE VAN DE ONDERDELEN	84
11.3	DESINFECTIE EN HERGEBRUIK VAN DE	
	ROLSTOEL	84
11.4	LANGDURIGE OPSLAG	85
11.5	VERWIJDERING/RECYCLING VAN DE	
	ONDERDELEN	85

12	OPLOSSINGEN VOOR MOGELIJKE PROBLEMEN	86
13	TECHNISCHE GEGEVENS	87
14	GARANTIE	88
15	GARANTIECERTIFICAAT	90

1 INLEIDING

Een continue zoektocht naar kwaliteit, creativiteit, innovatie in stijl en design.

Rehateam s.r.l., een serieus en betrouwbaar bedrijf dat echt geïnteresseerd en attent is op het bereiken van klanttevredenheid.

We zijn een andere weg ingeslagen dan vele anderen: kwaliteit en service op de eerste plaats.

Al onze modellen beschikken over oneindige variaties om de functionaliteit van elk model aan te passen, zorgvuldig geselecteerde materialen, nauwgezette testen en controles om altijd het beste te kunnen bieden en tenslotte uiteraard betrouwbare, serieuze en snelle service.

Wat wij zijn, hebben we te danken aan uw klanten en aan alle mensen die ons in al die jaren hebben gesteund door ons het vertrouwen en de stimulans te geven om nieuwe wegen in te slaan.

We zijn het verschuldigd aan al die mensen die, net als wij, er vast van overtuigd zijn dat kwaliteit het verschil maakt en het als een bron van trots beschouwen.

VOOR DE DETAILHANDELAAR

Deze handleiding MOET aan de gebruiker van deze rolstoel worden overhandigd.

ALVORENS de rolstoel aan de gebruiker af te leveren, MOET de detailhandelaar een algemene controle van de rolstoel in al zijn bevestigingsonderdelen uitvoeren en hun functionaliteit controleren.

Nadat de controle is uitgevoerd, moet de detailhandelaar het stempel van zijn/haar bedrijf of waarvoor hij/zij werkt, zijn/haar naam en de datum zetten in het GARANTIECERTIFICAAT dat door de gebruiker moet worden bewaard.

Het ontbreken van de stempel en handtekening op het garantiecertificaat maakt de productgarantie ongeldig.

De producten zijn bedoeld voor patiënten bij wie de visuele, cognitieve en leesvaardigheid intact is.

In het geval dat sommige of al deze capaciteiten beperkt of gecompromitteerd zijn, is de aanwezigheid van een begeleider met geschikte capaciteiten altijd vereist.

VOOR DE GEBRUIKER en/of VOOR DE BEGELEIDER

LEES VOORDAT u deze rolstoel gaat gebruiken deze handleiding in zijn geheel door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Controleer of het garantiecertificaat is ingevuld door de detailhandelaar en bewaar het zorgvuldig.

OPMERKING

Dit document is ook beschikbaar in PDF-formaat voor slechtzienden op de site www.rehateamprogeo.com die ook bereikt kan worden door de QR-code te scannen.



2 BRANDWERENDE EIGENSCHAPPEN, SYMBOLEN

2.1 BRANDWERENDE EIGENSCHAPPEN

Dit product is getest in overeenstemming met norm EN12183.
Deze norm voorziet ook in een brandbaarheidstest.

Brandwerendheidsclassificatie van beklede onderdelen: M2 en M3.

2.2 SYMBOLEN



GEVAAR!

Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel.



VOORZICHTIGHEID!

Geeft een verboden of afgeraden handeling aan.



WAARSCHUWING!

Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot licht persoonlijk letsel of materiële schade.



BELANGRIJK!

Geeft belangrijke instructies of speciale informatie aan.

3 PRODUCTETIKET



 Merklogo van Progeo	 Code “UDI” (Unique Device Identification)
 “MD”-markering (Medical Device)	 Jaar/maand van fabricage
 “CE”-markering	 Serienummer
XXXXXXX Naam van het product	 Temperatuurgrenzen bij gebruik
 Botstest geslaagd Geschikt voor het vervoer van de rolstoel met persoon in een voertuig	 Max Maximale belasting
 Niet geschikt voor het vervoer van de rolstoel met persoon in een voertuig	 Max Maximale helling bij gebruik
 Lees de gebruiksaanwijzing	 Gegevens van de fabrikant

4 BEDOELD GEBRUIK EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Dit rolstoelmodel is een zelfduwend model, wat betekent dat de beweging **handmatig op de rolstoel wordt overgebracht** door te duwen op de leuning van de achterwielen, maar deze kan ook door de begeleider worden overgebracht via de duwhandgrepen.

Indien voor de zelfduwende werking de onderste ledematen worden gebruikt, moet ervoor worden gezorgd dat de voeten en/of benen van de gebruiker niet met onderdelen van de rolstoel in aanraking komen.

Hij heeft zowel een revaliderende als een actieve functie en is daarom geschikt voor dagelijks gebruik door zowel gebruikers met ernstige pathologieën (met beperkte bewegingen van de benen, armen of romp) als "actieve" gebruikers (die zelfstandig activiteiten kunnen uitvoeren).

Hij wordt gebruikt om de autonome of ondersteunde beweging (door middel van een begeleider) van een gebruiker te garanderen met verminderde of niet-bestaande beweging in een of meer lichaamsdelen.

Door het brede scala aan accessoires en mogelijke configuraties kan de rolstoel zowel binnen (appartement, sportschool, school, bibliotheek, enz.) als buiten (straat, stoep, binnenplaats enz.) uiterst veilig worden gebruikt zolang de temperatuur tussen - 30°C en + 60°C ligt.

De temperatuur van de oppervlakken van de rolstoel die direct in aanraking met de huid van de gebruiker/begeleider kunnen komen, kan oplopen tot boven 41° (bijv. blootstelling aan de zon). Let daarom goed op voordat de rolstoel in gebruik wordt genomen.

In het geval van bijzonder ernstige pathologieën of gebruikers die niet in staat zijn om fysiek op eigen kracht te bewegen wordt de aanwezigheid van een begeleider altijd aangeraden.

Bovendien wordt niet aanbevolen om hem te gebruiken op bergachtige of bijzonder ontoegankelijke paden, zanderig of zeer ruw terrein, ondergronden met een helling die groter is dan de maximaal toegestane helling en zure omgevingen.



WAARSCHUWING!

Tijdens het dagelijkse gebruik van de rolstoel kan de gebruiker op oneffen, onregelmatig (grind, porfier, paden met gaten enz.) of glad (natte grond, aanwezigheid van zand, stof, olie enz.) terrein komen.

In al deze omstandigheden en meer in het algemeen in alle gevallen waarin het gebruik van het voertuig moeilijk en soms riskant kan zijn (voor het de rolstoel en zijn bestuurder), is de grootste voorzichtigheid en constant besturen van het voertuig altijd aanbevolen zonder plotseling optrekken of remmen.

Bij grotere moeilijkheden en risico's wordt de aanwezigheid van een begeleider altijd aanbevolen.

De maximale helling die kan worden bereden zonder risico dat de rolstoel achterover kantelt is 3° (6%).

Alle voetsteunen vereisen dat de gebruiker sokken of schoenen draagt, plaats daarom geen blote voeten op de voetsteunen.

Het zitvlak, bekleding of anders, indien beschikbaar voor dit model, is niet bedoeld voor de gebruiker om direct op te zitten; het is daarom noodzakelijk de rolstoel te nemen inclusief kussen, dat afzonderlijk en volgens de specifieke behoeften van de gebruiker moet worden besteld, op het zitvlak wordt geplaatst en waarop de gebruiker zal zitten.



WAARSCHUWING!

Beknelling, gaten en vrije ruimten: de rolstoel voldoet aan de voorschriften betreffende veiligheidsafstanden. Let tijdens het gebruik goed op als onder bepaalde functionele omstandigheden niet aan deze afstanden wordt voldaan (insluiting van vingers en voeten).



BELANGRIJK!

Sommige rolstoelconfiguraties kunnen een **breedte hebben van meer dan 700 mm.**

In dit geval en in sommige omstandigheden is het wellicht niet mogelijk om sommige of alle branduitgangen in een gebouw te gebruiken.

Als uw rolstoel is geconfigureerd voor een breedte van meer dan 700 mm, kan het moeilijk, zo niet onmogelijk zijn om het openbaar vervoer of (rolstoel)liften te gebruiken.

Sommige rolstoelconfiguraties kunnen een **breedte hebben van meer dan 1200 mm.**

In dergelijke gevallen kan het gebruik van openbaar vervoer en/of het vervoeren van de rolstoel met persoon (indien vereist) moeilijk, zo niet onmogelijk zijn.

Dit model is gezien de afmetingen en structurele eigenschappen geschikt voor gebruikers tieners en volwassenen.

De maximale belasting die dit model kan dragen is: 125kg.

5 INBEDRIJFSTELLING EN GEBRUIK

5.1 ALGEMENE INFORMATIE



WAARSCHUWING!

Het is belangrijk dat een controle van de functionele onderdelen **UITSLUITEND WORDT UITGEVOERD DOOR GEKWALIFICEERD EN GEAUTORISEERD PERSONEEL**, zowel om de geschiktheid te beoordelen als om de juiste gebruiksinstructies te geven aan de gebruiker en ook aan elke begeleider.

Mocht de gebruiker en/of begeleider een defect aan een onderdeel van de rolstoel ontdekken, dan zijn ze verplicht om de detailhandelaar te raadplegen voor de oplossing van elk probleem.

Het niet opvolgen van de aanwijzingen/instructies in deze handleiding kan leiden tot storingen en/of schade aan de rolstoel en/of aan de gebruiker en/of aan derden.

is niet verantwoordelijk voor enige schade aan de rolstoel en/of letsel bij de gebruiker en/of bij derden veroorzaakt of voortvloeiend uit het niet opvolgen van de aanwijzingen/instructies.



VOORZICHTIGHEID!

Het gebruik van de rolstoel vereist dat sommige onderdelen worden gehanteerd.

Instructies voor juist hanteren van de onderdelen van de rolstoel zijn te vinden in de overeenkomstige hoofdstukken van dit document.

Volg daarom deze instructies om eventueel letsel te voorkomen.



VOORZICHTIGHEID!

De installatie en het gebruik van elektrische apparaten, mechanische en/of elektrische bewegingsapparatuur ((rolstoel) liften) of enig ander ondersteuningssysteem dat niet door Rehateam s.r.l. is geleverd op het moment van levering kan resulteren in onvoorziene spanningen tijdens het testen van het product en diensgevolge is de integriteit en volledige veiligheid van het product niet gegarandeerd.

In het geval van installatie van extra accessoires voor het product geleverd door Rehateam s.r.l. moet dit worden gegarandeerd door uw detailhandelaar, door de fabrikant van het accessoire en goedgekeurd door Rehateam s.r.l..

5.2 BANDENSPANNING

Om altijd de juiste rem- en roleigenschappen van de rolstoel te garanderen moeten de banden altijd goed opgepompt zijn.

Verwijder met uw vingers de plastic dop die het ventiel op de rand van het achterwiel afdekt.

Gebruik een compressor of pomp die is uitgerust met een manometer om de druk naar de juiste waarde te brengen.

Draai de plastic dop er weer op.



WAARSCHUWING!

Controleer wekelijks de juiste bandenspanning zoals aangegeven op de band (de waarde halverwege min. en max. wordt aanbevolen).

Met de juiste bandenspanning is de rolstoel merkbaar soepeler en beter beheersbaar tijdens het manoeuvreren.


Een onjuiste druk (vooral als deze lager is) veroorzaakt een onjuiste werking van de parkeerremmen op de band (het stoppen van het voertuig is mogelijk niet gegarandeerd).



VOORZICHTIGHEID!

Overschrijd de op de band aangegeven spanning niet, u zou de binnenband of de buitenband kunnen beschadigen.

Respecteer altijd de aanduidingen in de markering op de band.

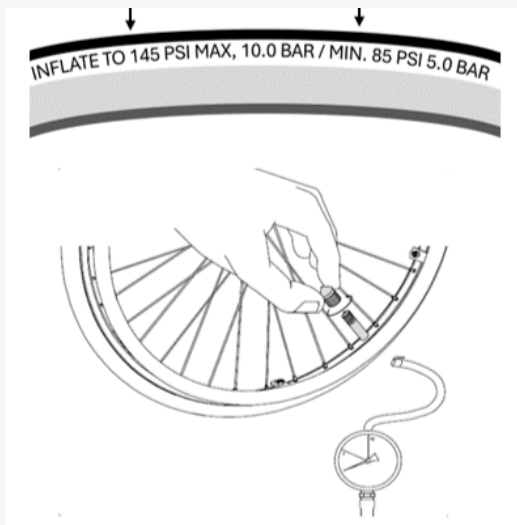



BELANGRIJK!

De voorwielen kunnen ook van het "pneumatische" type zijn, volg in dit geval dezelfde instructies.

Massieve banden hoeven niet opgepompt te worden.

Dit type band vraagt minder onderhoud en verlaagt de kosten van reparatie of vervanging als gevolg van een lekke band.

In vergelijking met banden met binnenband rijden ze bij normaal gebruik iets minder soepel en absorberen ze minder roltrillingen op oneffen ondergrond.

5.3 REMMEN



VOORZICHTIGHEID!

De parkeerremmen zijn een veiligheidsvoorziening, daarom is het noodzakelijk om hun effectiviteit dagelijks te controleren.

De drukrem werkt met een hendel direct op de buitenband, daarom hangt de effectiviteit van de rem af van de juiste bandenspanning.

Het wordt aanbevolen om periodiek te controleren of de druk van de buitenbanden juist is.

De maximale helling voor veilig en effectief werkende parkeerremmen is 3° (6%).

De rem is een veiligheidsvoorziening en mag niet worden gebruikt om de rolstoel tijdens het rijden af te remmen, aangezien hierdoor het voertuig kan kantelen met als gevolg letsel voor de gebruiker.



BELANGRIJK!

Gebruik om de effectiviteit van de remmen te controleren ze zoals hieronder beschreven, afhankelijk van het type rem, en probeer terwijl de persoon op de rolstoel zit de rolstoel lichtjes te duwen.

Als de achterwielen niet draaien of als ze met grote moeite draaien en dus onbedoelde beweging van de rolstoel voorkomen, zijn de parkeerremmen effectief.

Controleer of de beide remmen niet ongewenst vrijgezet kunnen worden wanneer ze geactiveerd zijn.

Afhankelijk van het type rem dat wordt gekozen kan het activeren/losmaken van de rem meer of minder kracht vereisen.

Voor gebruikers met minder kracht in de bovenste ledematen is het raadzaam om de verlengde hendel te gebruiken.



WAARSCHUWING!

Pas op dat uw vingers niet bekneld raken bij het activeren of losmaken van de rem, maar ook in elke andere situatie waarin de handen dicht bij de remmen komen.

5.4 TYPEN REMMEN

5.4.1 Gebogen duwremhendel

Duw om de rem te vergrendelen de hendel naar voren totdat u een klik hoort.

Trek om de rem te ontgrendelen de hendel naar achteren.

De rem komt automatisch weer tot rust.




5.4.2 Rechte duwremhendel

Duw om de rem te vergrendelen de hendel naar voren totdat u een klik hoort.

Trek om de rem te ontgrendelen de hendel naar achteren.

De rem komt automatisch weer tot rust.

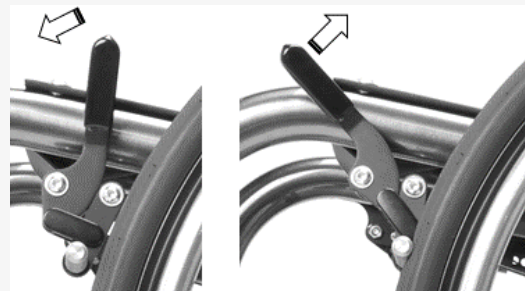


5.4.3 Rechte trekremhendel

Trek om de rem te vergrendelen de hendel naar achteren totdat u een klik hoort.

Duw om de rem los te maken de hendel naar voren.

De rem komt automatisch weer tot rust.

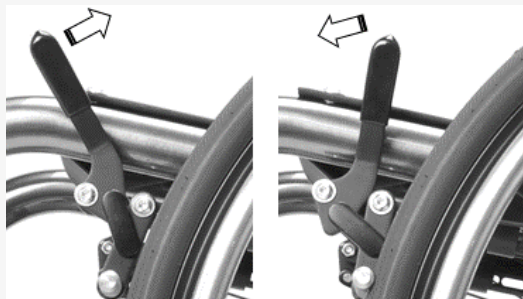

5.4.4 Rem met verlengde trek- of duwhendel

Duwrem: duw om de rem te vergrendelen de hendel naar voren totdat u een klik hoort.

Trek om de rem te ontgrendelen de hendel naar achteren.

De rem komt automatisch weer tot rust.

Trekrem: trek om de rem te vergrendelen de hendel naar achteren totdat u een klik hoort.


Duw om de rem los te maken de hendel naar voren.

De rem komt automatisch weer tot rust.

Verlengde hendel: om te voorkomen dat de hendel het overstappen van de gebruiker in of uit de rolstoel belemmert, kan de hendel naar voren worden geklapt.

Schuif hiervoor de hendel eerst omhoog en vervolgens naar voren.

Voer de omgekeerde handeling uit om hem terug te brengen naar de normale gebruiksstand.

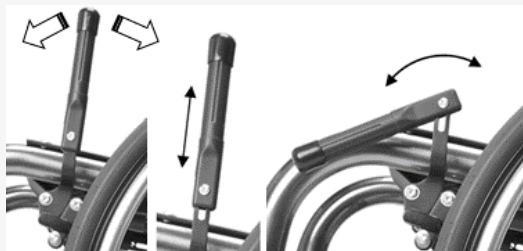

5.4.5 Rem “sport”


Draai om de rem te vergrendelen de hendel naar buiten totdat u een klik hoort.

Druk om de rem te ontgrendelen knop **(1)** van de hendel naar voren.

De rem komt automatisch weer tot rust.

Dit type rem verkleint de afmetingen van de rolstoel wanneer de wielen worden verwijderd, en voorkomt dat de rempen de hand raakt, zelfs bij de grootste stoten.

Hij is echter lager en minder gemakkelijk te bedienen dan traditionele remmen en daarom minder geschikt voor gebruikers met verminderde controle/ beweeglijkheid van de romp en/of bovenste ledematen.

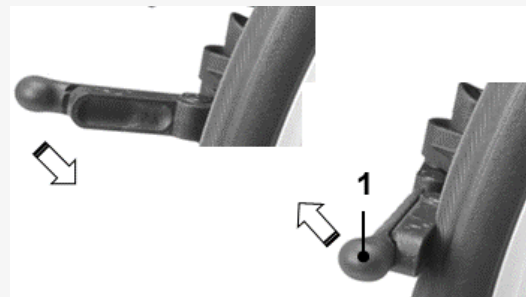

5.5 ACHTERWIELEN MET SNELONTKOPPELING

De achterwielen met snelontkoppeling maken het mogelijk om de afmetingen van de rolstoel te verkleinen, waardoor plaatsen in de auto wordt vergemakkelijkt of, als de rolstoel is uitgerust met het accessoire "wieltes voor smalle doorgangen", om de breedte en lengte te verkleinen om toegang te krijgen tot de krapste ruimtes.

Controleer of de snelkoppelingspennen van de achterwielen juist zijn ingebracht wanneer er niemand op de rolstoel zit.

De parkeerremmen moeten worden ontgrendeld.

Breng het achterwiel omhoog door de rolstoel lichtjes van de grond te tillen door het vast te pakken bij een handgreep van de rugleuningbuis.

Pak de naaf van het achterwiel met uw hand vast (zonder de pen in te drukken) en zorg ervoor dat u uw vingers tussen de spaken steekt.

Trek en duw aan het wiel (zoals aangegeven door de pijl) om te controleren of het correct is ingebracht: het wiel hoort niet eruit te vallen.

Mocht het wiel tijdens deze controle loskomen, dan is verstelling van de pen vereist.


Verstellingen mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd en geautoriseerd personeel.



WAARSCHUWING!

Het controleren van de achterwielpenen is een van de procedures die de gebruiker regelmatig moet uitvoeren.

Onjuiste plaatsing en/of afstelling van de penen kan tijdens het gebruik de beschadiging van de componenten en het loskomen van het achterwiel veroorzaken met als gevolg dat de rolstoel kantelt en mogelijk letsel aan de gebruiker toebrengt.

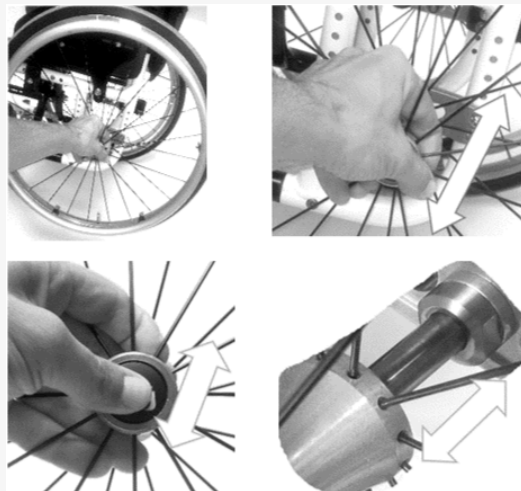

Ontgrendel om het wiel te verwijderen eerst de parkeerremmen.

Til het wiel van de rolstoel iets van de grond, waarbij u de knop op de rugleuning met één hand vastpakt om de bediening te vergemakkelijken.

Pak het wiel vast bij de spaken rond de naaf, druk met de duim op de knop van de pen en trek zonder loslaten het complete wiel naar buiten.

Ontgrendel om het wiel in te steken eerst de parkeerremmen.

Til de rolstoel van de grond, waarbij u de knop op de rugleuning met één hand vastpakt om de bediening te vergemakkelijken.

Pak het wiel vast bij de spaken rond de naaf, druk met de duim op de knop van de pen en steek zonder loslaten de pen geheel in de passende bus.

Laat de knop van de pen los om het wiel te vergrendelen (een klik geeft aan dat het wiel correct is vergrendeld).



WAARSCHUWING!

Voer het inbrengen en verwijderen van het achterwiel altijd uit met de parkeerremmen los. Controleer altijd of de pennen correct zijn ingebracht. Door de aanwezige gaten voor de positionering van het achterwiel bestaat gevaar voor beknelling van de vingers. Wees voorzichtig in elke situatie waarin uw handen in de buurt van deze gaten komen.

5.6 DE ROLSTOEL UIT- EN INKLAPPEN

Dit rolstoelmodel kan worden ingeklapt door op het kruis te drukken.

5.6.1 Uitklappen

Plaats uw handpalmen over de twee zittingbuizen, positie **(1)** en **(2)** en druk stevig naar beneden totdat de rolstoel volledig uitgeklapt is.

Controleer na het uitklappen van de rolstoel altijd zeer zorgvuldig of de kruisbuizen goed in de vier steunen **(3)** zijn gestoken.

Om de bediening te vergemakkelijken, verdient het de voorkeur om één achterwiel iets hoger te zetten, zodat de wrijving op de vloer het niet geblokkeerd houdt.

Pak hiervoor een van de knoppen op de rugleuning vast en til de rolstoel iets op.

Druk met de vrije hand stevig naar beneden op de zittingbuizen.

Controleer of de zittingbuizen correct in de passende steunen zijn ingevoerd.

Laat de voetsteun zakken (deze handeling is niet nodig als er een enkele opklapbare voetsteun is gemonteerd).



WAARSCHUWING!

Let erop dat de vingers van de hand tijdens het uitklappen niet tussen de zittingbuis en de steunen, of tussen de zittingbuis en de framebuis terechtkomen



5.6.2 Opklappen

Verwijder het kussen of andere zachte en stijve steunen van de stoel of rugleuning.

Breng de voetsteun of voetsteunen omhoog (deze handeling is niet nodig als er een enkele opklapbare voetsteun is gemonteerd).

Trek de stoelbekleding met beide handen naar boven zoals op de afbeeldingen wordt getoond.



5.7 VOETSTEUN

5.7.1 Algemene informatie



WAARSCHUWING!

Zet uw voeten niet op de voetsteun tijdens overstappen, dit kan ertoe leiden dat de rolstoel voorover kantelt, of de overmatige lading kan de voetsteun breken met mogelijk letsel voor de gebruiker.

Controleer na elke operatie of de voetsteun in de juiste positie staat voor gebruik.

Gespleten voetsteunen, die minder stevig zijn dan enkele, zijn niet geschikt voor gebruikers met sterke spasmen en/of krampen.



WAARSCHUWING!

Gebruik de rolstoel niet blootsvoets om mogelijke brand- en/of schaafwonden aan de voeten te vermijden.

Controleer of de oppervlakken van de voetsteun in goede staat verkeren aangezien bij aanraking met andere oppervlakken (grond, muren, meubels, enz.) scherpe en mogelijk gevaarlijke delen kunnen ontstaan.

Afhankelijk van de behoefte van de patiënt kan een van de aangegeven voetsteunen worden gemonteerd.

De positie (binnen, buiten, midden) van elke voetsteun hangt af van het model van de voetsteun en kan gekozen worden bij het invullen van het bestelformulier

Alle voetsteunen, met uitzondering van voetsteunen die automatisch kunnen opklappen bij het optillen, zorgen voor een betere ondersteuning van de voeten op de grond.


De enkele voetsteunen zijn steviger en stijver dan de gespleten voetsteunen, daarom zijn ze bijzonder geschikt voor gebruikers met sterke krampen in de onderste ledematen en die de neiging hebben om veel met hun voeten op de voetsteun te duwen.

Het optillen van de voetsteun is een zeer eenvoudige handeling die wordt uitgevoerd door de plaat van de voetsteun met één hand omhoog te tillen.

Laat om de voetsteun terug te brengen naar de gebruiksstand deze eenvoudigweg zakken en controleer in het geval van een enkele voetsteun dat hij in de speciale steun is gehaakt zoals aangegeven voor elk type voetsteun.

Meer informatie over voetsteunen

Volgens norm UNI EN 12183 paragraaf 6.1 is het bij aanwezigheid van gespleten voetsteunen noodzakelijk om de juiste afstand tussen de twee voetsteunplaten te behouden:

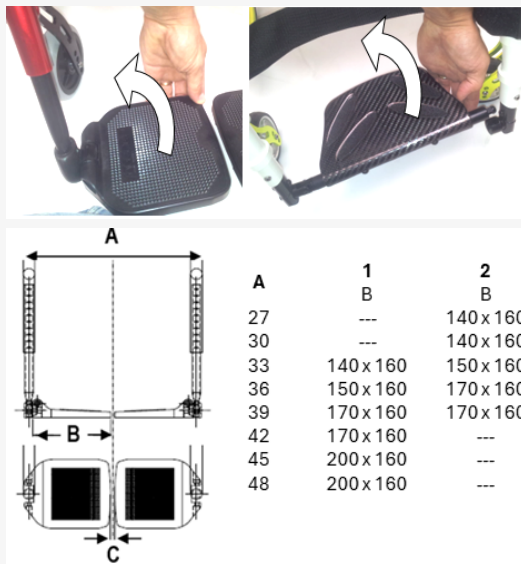

De afstand tussen de twee voetsteunplaten “C” mag niet groter zijn dan 35 mm voor rolstoelen bedoeld voor volwassenen (1).

De afstand tussen de twee voetsteunplaten “C” mag niet groter zijn dan 25 mm voor kinderen (2).

In de tekening sommen we voor de verschillende zitbreedtes “A” de bijbehorende gespleten voetsteun “B”:


5.7.2 Gespleten voetsteun

Controleer of beide plastic voetsteunen volledig zijn neergelaten voordat u het voertuig gebruikt.



5.7.3 Optilbare enkele voetsteun van plastic

Controleer of borgpen (1) correct in de groef op steun (2) is gestoken.

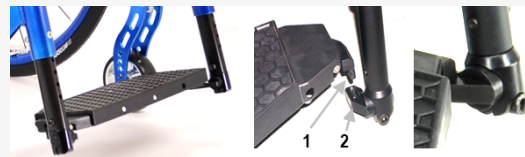

5.7.4 Enkele voetsteun van aluminium

Controleer of borgpen (1) correct in de sleuf op steun (2) is gestoken.



5.7.5 Optilbare enkele voetsteun van koolstofvezel

Controleer of borgpen (1) correct in de sleuf op steun (2) is gestoken.

De plaat van de voetsteun van koolstofvezel kan ook 180° worden gedraaid, dit kan de ingenomen ruimte verminderen of tijdelijk omgekeerd staan mogelijk maken.

Til om deze handeling uit te voeren eenvoudigweg de plaat van de voetsteunplaat een beetje op en draai deze naar de tegenovergestelde positie.

Nu kunt u de rolstoel inklappen of de voetsteun in de steun haken.



5.7.6 Automatisch inklappende enkele voetsteun van plastic

De controle is niet nodig omdat bij het correct uitklappen van de rolstoel ook de voetsteun automatisch uitklapt.



5.7.7 Automatisch inklappende enkele voetsteun van aluminium

De controle is niet nodig omdat bij het correct uitklappen van de rolstoel ook de voetsteun automatisch uitklapt.



5.8 KUITBAND


In sommige gevallen, afhankelijk van de diameter van het voorwiel en de breedte van de rolstoel, is het mogelijk dat het voorwiel bij het draaien in aanraking komt met de hiel van de gebruiker.

Om elk mogelijk contact te voorkomen en te voorkomen dat het voertuig kantelt is de rolstoel voorzien van een kuitband, die zo moet worden afgesteld dat de voeten van de gebruiker nooit in contact komen met de voorwielen.



BELANGRIJK!

De kuitband is eenvoudig verstelbaar door middel van het aanwezige Velcro.

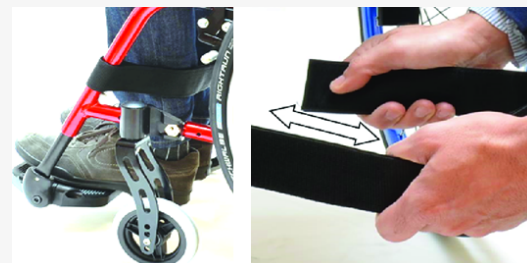

5.9 AANSPANBARE RUGLEUNING

De rugleuning kan worden aangespannen en aangepast aan de individuele lichaamshouding door middel van speciale banden van Velcro die in het kussen zijn geplaatst.

Verhoog of verwijder de banden van Velcro naar wens om het kussen te verstellen en plaats het kussen terug.



VOORZICHTIGHEID!

De combinatie van de helling van de zitting, de helling van de rugleuningbuizen en de helling van een houdingsrugleuning ten opzichte van de buizen zou kunnen resulteren in een hoek groter dan 25° ten opzichte van verticaal.

In dat geval moet de rolstoel een hoofdsteen of inrichting hebben om deze vast te zetten zoals bedoeld voor dit model.



BELANGRIJK!

Als de rolstoel is uitgerust met een houdingsrugleuning in plaats van het kussen, volg dan de instructies van het houdingssysteem.

5.10 ARMLEUNINGEN

5.10.1 Algemene informatie

Dit model kan worden uitgerust met armleuningen.

De armleuningen zijn vooral handig voor mensen met verminderde hand- en armfunctie en met een beperkte rompcontrole, die meer stabiliteit nodig hebben bij het zitten in de stoel.





VOORZICHTIGHEID!

Gebruik de armleuning niet als grijppunt om de rolstoel op te tillen, omdat de armleuningen hierdoor uit hun steun kunnen komen met mogelijke gevolgen voor de gebruiker en de rolstoel.

Gebruik de armsteun niet als steunpunt tijdens overstappen.

Het is daarentegen raadzaam om de armsteun aan de zijde van de beweging te verwijderen om de beweging te vergemakkelijken.



WAARSCHUWING!

ArMLEuningkussens kunnen ftalaten bevatten die bij inslikken mogelijk gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

Vermijd onder andere krabben op het kussen en eventuele resten in uw vingers in uw mond te stoppen of, erger nog, knabbelen/zuigen aan het kussen (waarschijnlijk in het geval van kinderen).



WAARSCHUWING!

Let altijd goed op bij het aanbrengen van de armen en handen op de armleuning om ongevallen te vermijden.

5.10.2 Buisvormige armleuningen met standaardsteun

Dit type armleuning kan worden verwijderd of opzij worden gedraaid, wat rondbewegen aanzienlijk vergemakkelijkt.

Bij dit type armleuningen wordt de rolstoel geleverd met kledingbeschermers.

GEBRUIKSSTAND

Pak om de juiste gebruiksstand **(1)** te controleren met één hand de armleuning **(2)** vast en probeer hem naar links en rechts te bewegen.

Als de armleuning niet draait (u voelt misschien een beetje speling), is deze klaar voor normaal gebruik.

Correct vastmaken vindt plaats wanneer de twee platen van steun **(3)** inschuiven tussen de twee platen van steun **(4)**.

ROTATIE

Om het rondbewegen te vergemakkelijken is het mogelijk om de armleuning te draaien: til hem ongeveer 2 cm **(5)** op en draai hem zijwaarts tot hij, indien gewenst, in de tegenovergestelde positie **(6)** vasthaakt.

Om de armsteun weer in de gebruiksstand terug te brengen draait u hem totdat hij vasthaakt (als hij in de tegenovergestelde positie is vastgehaakt, tilt u hem ongeveer 2 cm op voordat u hem draait).

VERWIJDEREN/AANBRENGEN

Trek om de armsteun te verwijderen deze simpelweg omhoog.

Steek om de armsteun terug te plaatsen de pen van steun **(7)** in het gat van steun **(3)** en draai de armleuning totdat deze correct vasthaakt, zoals hierboven beschreven.





WAARSCHUWING!

Dit type armleuning kan op elk moment vrij uit zijn steun worden verwijderd.

Zorg er altijd voor dat de armleuningen vergrendeld zijn in gebruiksstand **(1)** (naar voren en parallel aan de zijkanten van de rolstoel).

In alle andere posities (behalve aan de achterkant vergrendeld), kunnen ze vrij draaien; zorg er daarom voor dat de armleuningen altijd op hun plaats zijn vergrendeld voordat u de rolstoel gaat gebruiken.

Als dit punt niet in acht wordt genomen, kan de rolstoel of de gebruiker kantelen.



BELANGRIJK!

Vanwege de precisie van de steunen is het plaatsen en verwijderen van de armleuning alleen mogelijk met een perfect verticale beweging.

5.10.3 Buisvormige armleuningen met stalen steun

Dit type armleuning kan worden verwijderd of opzij worden gedraaid, wat rondbewegen aanzienlijk vergemakkelijkt.

Bij dit type armleuningen wordt de rolstoel geleverd met kledingbeschermers.

GEBRUIKSSTAND

Pak om de juiste gebruiksstand **(1)** te controleren met één hand de armleuning **(2)** vast en probeer hem naar links en rechts te bewegen.

Als de armleuning niet draait (u voelt misschien een beetje speling), is deze klaar voor normaal gebruik.

Correct vasthaken vindt plaats wanneer de twee platen van steun **(3)** inschuiven tussen de twee platen van steun **(4)**.

Als de stalen steun correct vastgehaakt is, kan de armleuning niet ongewenst verwijderd worden.

Dit kunt u controleren door de armleuning omhoog te trekken: na een beweging van circa 1 cm hoort de armleuning te vergrendelen.

ROTATIE

Om het rondbewegen te vergemakkelijken, kan de armleuning worden gedraaid: til hem ongeveer 1 cm omhoog (deel **(4)** van de steun stijgt ten opzichte van deel **(3)** zonder te ontkoppelen) en draai hem opzij.

Indien gewenst kan de armleuning worden gedraaid totdat deze in de tegenovergestelde positie vasthaakt (deel **(4)**A schuift deel **(3)** in).

Herhaal de bovenstaande handelingen om de armleuning in de gebruiksstand terug te plaatsen.

Tijdens de rotatie blijven de twee steunen **(3)** en **(4)** ongeveer 1 cm opgeheven, maar komen ze niet van elkaar los.

VERWIJDEREN/AANBRENGEN

Om de armleuning te verwijderen is het daarom nodig om met één vinger pen **(8)** te verplaatsen richting het gat en de armleuning op te tillen.



Steek om de armsteun terug te plaatsen de pen **(7)** van steun in het gat van het deel **(3)** en draai de armleuning totdat deze correct vasthaakt, zoals hierboven beschreven.



WAARSCHUWING!

Zorg er altijd voor dat de armleuningen vergrendeld zijn in gebruiksstand **(1)** (naar voren en parallel aan de zijkanten van de rolstoel).

In alle andere posities (behalve aan de achterkant vergrendeld), kunnen ze vrij draaien; zorg er daarom voor dat de armleuningen altijd op hun plaats zijn vergrendeld voordat u de rolstoel gaat gebruiken.

Als dit punt niet in acht wordt genomen, kan de rolstoel of de gebruiker kantelen.



BELANGRIJK!

Vanwege de precisie van de steunen is het plaatsen en verwijderen van de armleuning alleen mogelijk met een perfect verticale beweging.

5.10.4 Armleuning Desk Progeo

Dit type armleuning is erg praktisch en kan volledig worden verwijderd, wat beweging en transport aanzienlijk vergemakkelijkt.

Bovendien is in de armleuningen ook een rechte kledingbeschermer geïntegreerd.

GEBRUIKSSTAND

Pak ter controle van de juiste bevestiging van de armsteun deze met één hand op het kussen **(1)** vast en trek hem omhoog.

De armsteun mag niet loskomen van steun **(2)** en het kussen **(1)** hoort ook niet te bewegen.

VERWIJDEREN/AANBRENGEN

Duw om de armleuning te verwijderen tegen hendel B **(3)** en haal hem eruit door hem bij het kussen vast te pakken.

Breng de armleuning weer aan door het deel **(4)** ervan in de steun **(2)** aan te brengen.

Til ten slotte hendel **(3)** op om de armleuning te vergrendelen.

Een klik geeft aan dat deze is vastgehaakt.

Controleer zoals hierboven aangegeven of hij juist is vastgehaakt.

VERSTELLING

De armleuning kan ook gemakkelijk in hoogte worden versteld door de gebruiker

Druk knop **(5)** naar voren, houd deze omlaag en verhoog of verlaag de armleuning tot de gewenste hoogte.

Laat knop **(5)** los en haak hem in een van de gaten in de buis**(6)**.





WAARSCHUWING!

Controleer dat de armleuningen altijd goed vergrendeld zijn in de gebruiksstand.

Dit is om te voorkomen dat de armsteun per ongeluk loskomt, waardoor de gebruiker uit de rolstoel zou kunnen vallen.

Pas op dat uw vingers niet bekneld raken wanneer u het armsteunkussen volledig laat zakken.

5.10.5 Armleuning Flip-up Progeo

Dit type armleuning is erg praktisch.

Hij kan volledig worden gedraaid of verwijderd, wat beweging en transport aanzienlijk vergemakkelijkt.

GEBRUIKSSTAND

Pak ter controle van de juiste gebruikspositie **(1)** van de armsteun deze met één hand aan de voorste handgreep vast en trek hem omhoog

De armsteun mag niet loskomen van steun **(2)**.

ROTATIE

Draai de armleuning door de hendel **(3)** op de steun **(4)** omhoog te halen en vervolgens de armleuning naar achteren en omhoog **(5)** te draaien tot deze achter de rugleuning **(6)** is aangebracht.

In deze stand is het ook mogelijk om de armleuning achter de rugleuning verder te draaien door te roteren op de achterste steun **(7)**.



VERWIJDEREN/AANBRENGEN

Om de armsteun te verwijderen, moet deze eerst naar achteren worden gedraaid zoals hierboven aangegeven.

Laat de armleuning nu ongeveer 45° draaien tot het punt is bereikt waarin deze kan worden verwijderd.

Verwijder de armleuning door deze omhoog te trekken.

OPMERKING: op andere punten kan de pen (9) niet verticaal langs de steun (10) bewegen.

Breng de armleuning aan door de pen (9) in de steun (10) te steken. De pen kan in dit geval niet volledig worden aangebracht, er zullen circa 2cm uitsteken.

Draai de armleuning nu ongeveer 45° ten opzichte van de lijn van de zitting tot de pen (9) volledig in de steun (10) is aangebracht.

Lijn de armleuning met de lijn van de zitting uit en laat hem draaien om de bevestigingspen (11) in de voorste steun (2) aan te brengen.

Een «klik» geeft aan dat deze is vastgehaakt.

Controleer zoals hierboven aangegeven of hij juist is vastgehaakt.



VERSTELLING

De armleuning kan ook gemakkelijk in hoogte worden versteld door de gebruiker.

Druk knop (12) naar voren, houd deze omlaag en beweeg de armleuning tot de gewenste hoogte omhoog of omlaag.

Laat knop (12) los en haak hem in een van de gaten (13) in de buis.



WAARSCHUWING!

Controleer dat de armleuningen altijd goed vergrendeld zijn in de gebruiksstand.

Als dit punt niet in acht wordt genomen, kan de rolstoel of de gebruiker kantelen.

Pas op dat uw vingers niet bekneld raken wanneer u het armsteunkussen volledig laat zakken.



5.10.6 Afneembare armleuning

Dit type armleuning is erg praktisch en kan volledig worden verwijderd, wat beweging en transport aanzienlijk vergemakkelijkt.

Bovendien is in de armleuningen ook een rechte kledingbeschermer geïntegreerd.

GEBRUIKSSTAND

De juiste gebruikspositie **(1)** van de armleuning zorgt ervoor dat blad **(2)**, zodra het in steun **(3)** gestoken is, stopt door middel van schroef **(4)** in holte **(5)**.

VERWIJDEREN/AANBRENGEN

Pak om de armleuning te verwijderen deze eenvoudig bij het kussen vast en trek deze omhoog.

Steek om de armsteun te plaatsen blad **(2)** in steun **(3)** en schuif het naar de juiste gebruikspositie zoals hierboven aangegeven.



WAARSCHUWING!

Dit type armleuning kan op elk moment vrij uit zijn steun worden verwijderd.



5.11 KLEDINGBESCHERMERS

De kledingbeschermers kunnen van plastic zijn of, voor meer weerstand, van koolstofvezel. Ze kunnen bovendien van het type spatbord **(1)** of recht **(2)** zijn.

Kledingbeschermers van het type spatbord worden oorspronkelijk op ongeveer 5 mm van de band **(3)** bevestigd om te voorkomen dat de gebruiker zijn vingers tussen de buitenband en het spatbord steekt.

Uitneembare kledingbeschermers met "bladsysteem" **(4)**, spatbord of recht, gebruiken hetzelfde systeem als de uitneembare armleuningen — zie hoofdstuk 5.10.6 *Afneembare armleuning*



WAARSCHUWING!

Til de rolstoel niet op door deze vast te pakken aan de uitneembare kledingbeschermers, aangezien deze niet vergrendeld zijn.

Pas op dat uw vingers niet bekneld raken bij het inbrengen van de uitneembare kledingbeschermers.



VOORZICHTIGHEID!

Controleer of de oppervlakken van de kledingbeschermers in goede staat verkeren omdat ze scherpe delen kunnen hebben en de gebruiker kunnen verwonden.



BELANGRIJK!

Gebruik de kledingbeschermers niet als steunpunt tijdens overstappen.



5.12 BEVESTIGING VAN DE DELEN EN LEVENSDUUR VAN DE ROLSTOEL

5.12.1 Bevestiging van de delen

De rolstoel wordt bij aflevering aan de gebruiker gecontroleerd door de detailhandelaar, die er dus voor zorgt dat deze in perfecte staat verkeert. Dagelijks gebruik van de rolstoel kan echter leiden tot het losraken van schroeven en moeren.



WAARSCHUWING!

Het is aan te raden om minstens één keer per maand te controleren of alle onderdelen goed vastzitten en, indien nodig, hulp in te roepen van geautoriseerd personeel voor het onderhoud van rolstoelen van Progeo.

Zorg er in elke onderhoudscyclus voor dat alle schroeven en moeren goed zijn vastgedraaid.

Het niet naleven van deze waarschuwing kan schade veroorzaken aan de gebruiker, aan derden of aan het voertuig waarvoor Rehateam s.r.l. niet verantwoordelijk kan worden gehouden.

5.12.2 Levensduur van de rolstoel

We gaan ervan uit dat rolstoelen van Progeo elke dag worden gebruikt en bijgevolg blootstaan aan spanningen die een onvermijdelijke slijtage van de onderdelen veroorzaken.

Met inachtneming van deze factoren en zorgvuldig periodiek onderhoud hebben rolstoelen van Progeo een levensduur van 5 jaar.

De levensduur wordt aanzienlijk verlengd wanneer de rolstoel binnenshuis of sporadisch wordt gebruikt.

6 VEILIGHEID



VOORZICHTIGHEID!

De rolstoel Progeo is een medisch hulpmiddel, daarom wordt **STRIKT AFGERADEN EN VERBODEN** de rolstoel, zelfs tijdelijk, **AAN ANDERE GEBRUIKERS TE GEVEN**.

Het is verboden om zonder onze toestemming wijzigingen aan de rolstoel aan te brengen.

Het wijzigen van de rolstoel kan stabiliteits- en stevigheidsproblemen veroorzaken met mogelijke gevolgen voor de gebruiker.



WAARSCHUWING!

Rehateam s.r.l. wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van niet-naleving van de instructies of aanbevelingen in deze handleiding en dergelijke activiteiten zullen resulteren in de onmiddellijke annulering van de fabrieksgarantie.

BRANDLETSELGEVAAR! Onderdelen van de rolstoel kunnen warm worden als ze worden blootgesteld aan sterke zonnestraling.



BELANGRIJK!

Breng de fabrikant op de hoogte in geval van een ernstig ongeval met betrekking tot het apparaat.

Fabrikant: Rehateam s.r.l., Vicolo Negrelli 5, 31038 Castagnole di Paese TV, Italia, tel. 0039 0422 484657, mail: info_it@permobil.com

6.1 ONGEVALLEN VOORKOMEN

6.1.1 Bewegingen

Vermijd sterke belasting bij het gebruik van de rolstoel, aangezien deze kan kantelen.

Vermijd bij obstakels of oneffenheden abrupte manoeuvres (bijvoorbeeld abrupt remmen). Het gevaar van uitglijden neemt toe op natte oppervlakken of oneffen terrein.

Overwin obstakels zoals trappen of drempels voorzichtig (vraag hulp van een begeleider).

Voor meer veiligheid wordt aanbevolen om zich op hellende oppervlakken of andere als gevaarlijk beschouwde plekken zich alleen met een begeleider achter de rolstoel te verplaatsen.

6.1.2 Gebruikssnelheid

Pas de gebruikssnelheid van de rolstoel altijd aan de omstandigheden van het moment aan.

Over het algemeen raden we een constante snelheid aan, zonder te versnellen of plotseling van richting te veranderen.

6.1.3 Gebruik van de remmen

De druk-parkeerremmen zijn ontworpen om de rolstoel in een stationaire positie te stabiliseren.



VOORZICHTIGHEID!

Om veiligheidsredenen wordt afgeraden om tijdens het rijden met de parkeerremmen te remmen.



WAARSCHUWING!

Wees echter zeer voorzichtig bij het gebruik van de reminrichtingen om schade aan uw handen en vingers te voorkomen.

6.2 BEWEGINGEN: DE ROLSTOEL IN- EN UITSTAPPEN

In of uit de rolstoel stappen zijn altijd handelingen die met uiterste voorzichtigheid moeten worden uitgevoerd, zelfs door ervaren gebruikers, en mogen alleen worden uitgevoerd na instructies van deskundig en gespecialiseerd personeel. Mochten de overstapoperaties riskant blijken te zijn, dan is het raadzaam de hulp in te roepen van een begeleider. Al deze handelingen moeten echter altijd verband houden met uw pathologie en dus met uw mate van autonomie.

De algemene regels die in acht moeten worden genomen om bewegingen veilig uit te voeren zijn:

Beweeg terwijl de rolstoel op een regelmatige (vlakke) en stevige ondergrond staat.

Vermijd bewegen op een hellende ondergrond of een bijzonder oneffen ondergrond die de rolstoel onstabiel zou kunnen maken en meer kans geeft op een val van de gebruiker en het kantelen van de rolstoel. Vergrendel de rolstoel met de parkeerremmen.

Haal uw voeten van de voetsteun om uit te stappen. Zet uw voeten dicht bij de voetsteun om in te stappen.


Als de rolstoel is uitgerust met een opklapbare voetsteun (enkel of gespleten), breng dan de voetsteun(en) omhoog om deze handeling te vergemakkelijken.

(1) Leun op de rolstoel en eventueel ook op een stabiel object in de buurt. Zet kracht met uw armen om uw lichaam op te tillen en te bewegen.

(2) Indien de gebruiker fysiek niet in staat is om de beweging alleen uit te voeren, of indien deze beweging wordt uitgevoerd op een oneffen of onstabiele ondergrond, zorg dan voor hulp van een begeleider.

De begeleider die de beweging van de patiënt in en uit de rolstoel uitvoert moet deze altijd met uiterste voorzichtigheid uitvoeren.

Deze handelingen mogen alleen worden uitgevoerd na instructies van deskundig en gespecialiseerd personeel.

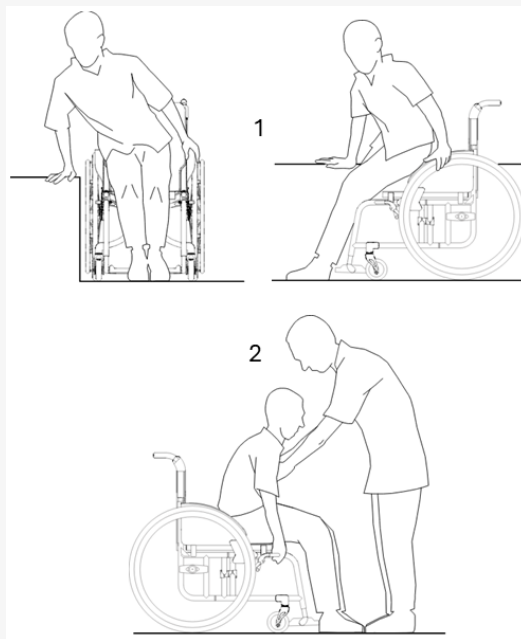

6.3 BEGINNEN MET RIJDEN IN UW ROLSTOEL

HET BALANSPUNT BEPALEN

Het gemak van het kantelen van de rolstoel is in hoofdzaak afhankelijk van de positie van de zitting en daarmee van de positie van het zwaartepunt ten opzichte van de achterwielen.

De juiste positie van de achterwielen is afhankelijk van veel en verschillende factoren, waaronder: het gewicht van de gebruiker, het type handicap en het vermogen om de rolstoel te besturen.

Het bedrijf levert de rolstoel en de positie van de achterwielen (trim) volgens de aanwijzingen op het bestelformulier.

Om het kantelpunt van uw rolstoel te bepalen en dus de limieten te begrijpen waarbinnen uw bewegingen absoluut veilig zijn gaat u als volgt te werk:

Zit in uw rolstoel.

Beweeg vooruit met stevige grip op de achterwielleuning.

Vervolgens zal met een lichte terugtrekking van de leuning en het verschuiven van het lichaamsgewicht naar achteren de voorkant van de rolstoel omhoog komen.

Door nu uw lichaamsgewicht lichtjes heen en weer te bewegen en de duwleuning naar voren en naar achteren te draaien, om het juiste zwaartepuntpositie te vinden en de rolstoel zwevend te houden, vindt u het kantelpunt.



WAARSCHUWING!

Om het kantelpunt te vinden moet er altijd een begeleider aanwezig zijn en deze moet net achter de rolstoel gaan staan om te voorkomen dat deze volledig omvalt.





WAARSCHUWING!

Als u een rugzak, een tas of een ander hoog voorwerp ophangt of haakt aan de duwhandgrepen, of in ieder geval aan het achterste deel van de rolstoel, kan deze gewichtstoename een aanzienlijke variatie veroorzaken in het achterwaartse kantelpunt van de rolstoel met als gevolg het risico op kantelen.

OM KANTELEN TIJDENS NORMAAL GEBRUIK VAN DE ROLSTOEL TE VOORKOMEN RADEN WIJ AAN HET KANTELBESCHERMINGSSYSTEEM TE INSTALLEREN.

6.4 OBSTAKELS OVERWINNEN: TRAPPEN EN HOOGTEVERSCHILLEN



WAARSCHUWING!

Benader alle onderstaande situaties altijd met de grootst mogelijke aandacht. Voordat u alleen (zonder de aanwezigheid van een begeleider) een trap betreedt, of meer in het algemeen een obstakel overwint, moet u een goede controle over uw rolstoel hebben en weten hoe u de rolstoel moet besturen, waarbij u uw evenwicht op de achterwielen houdt.

Voordat u een trap betreedt, of meer in het algemeen een obstakel overwint, moet u controleren of het kantelbeschermingssysteem in de neutraalstand is geplaatst.



GEVAAR!

Beklim in het algemeen geen trappen of obstakels die hoger zijn dan 20 cm.

Bij bijzonder lastige obstakels is het altijd nodig om hulp te vragen om deze manoeuvres gemakkelijk en veilig te maken.

6.4.1 Zelf een tree afdalen en beklimmen

AFDALEN


Rijd de rolstoel recht naar de rand van de trede, zodat de voorwielen zo dicht mogelijk bij de rand staan.

Breng de voorwielen omhoog door de rolstoel te kantelen en het evenwicht te bewaren.

Schuif de achterwielen heel voorzichtig over de rand.

Houd tijdens deze fase uw handen altijd stevig op de leuningen.

Zodra de achterwielen van de trede zijn gekomen en de grond hebben geraakt, vouwt u de rolstoel naar voren totdat de voorwielen de grond raken.

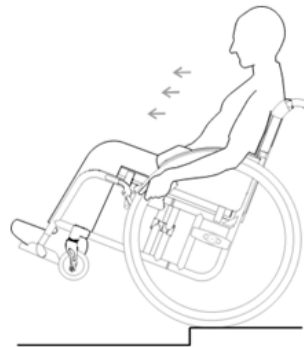

BEKLIMMEN

Rijd de rolstoel recht vooruit tot aan de rand van de trede.

Breng de voorwielen omhoog door de rolstoel te kantelen en het evenwicht te bewaren.

Schuif de achterwielen heel voorzichtig met behulp van de leuningen naar voren totdat ze de rand van de trede met de wielen raken.

Klap de rolstoel naar voren totdat de voorwielen de grond raken en zo het obstakel overwinnen.

Breng uw gewicht naar voren om de achterkant van de rolstoel te ontlasten.

Pak de leuningen stevig vast en draai ze naar voren, waardoor het achterwiel over de rand van de trede glijdt, waardoor het achterste deel van de rolstoel van de grond wordt getild en het obstakel wordt overwonnen.



6.4.2 Met een begeleider een tree afdalen en beklimmen

AFDALEN

Rijd de rolstoel recht naar de rand van de trede, zodat de voorwielen zo dicht mogelijk bij de rand staan.


Houd de knoppen van de handgrepen van de rugleuning stevig vast.

Oefen druk uit naar beneden om de voorkant van de rolstoel omhoog te brengen.

Houd de rolstoel in deze positie en begeleid hem voorzichtig de trede af.

De gebruiker, zittend op de rolstoel, kan de begeleider tijdens deze manoeuvre faciliteren door op de duwringen te werken.

Na het afronden van de afdaling klapt u de rolstoel naar voren totdat de voorwielen de grond raken.

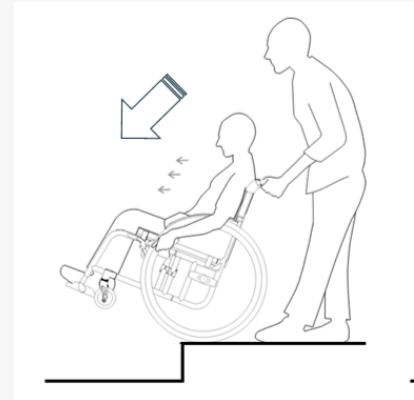


BEKLIMMEN

Rijd achteruit en breng de rolstoel dicht bij de trede, zodat het achterwiel de rand van de trede raakt.

Houd de knoppen van de handgrepen van de rugleuning stevig vast.

Trek stevig aan de handgrepen terwijl u de rolstoel gekanteld houdt (met de voorwielen omhoog) om te voorkomen dat de gebruiker van de stoel glijdt, en schuif de achterwielen over de trede omhoog.

Rijd de rolstoel over de rand en handhaaf de gekantelde positie, totdat ook de voorwielen op de grond kunnen worden geplaatst.

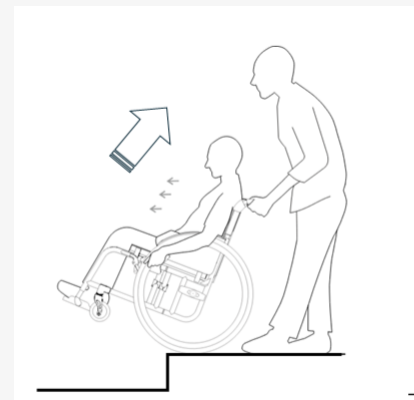

EEN REEKS TREDEN AFDALEN EN BEKLIMMEN



GEVAAR!

Bij trappen met meer dan één trede is de aanwezigheid van twee begeleiders altijd vereist.


De eerste begeleider gaat achter de rolstoel staan en houdt de duwbeugels vast.

De tweede begeleider pakt een vast deel van het voorframe vast en houdt zo de positie van de rolstoel stabiel.



BELANGRIJK!

Om het tillen van de rolstoel door de begeleider te vergemakkelijken, wordt aanbevolen om bij dit model een kantelhulpsysteem te installeren dat als accessoire wordt geleverd.

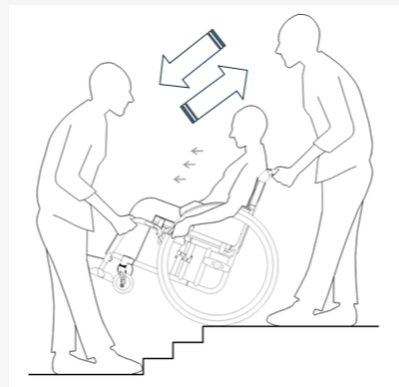

6.5 HELLINGEN EN BEKLIMMINGEN OVERWINNEN

EEN HELLING AFRIJDEN

Om juist een helling af te rijden moet de gebruiker tijdens het rijden altijd een constante en gecontroleerde snelheid en richting aanhouden.

Daal af met gematigde snelheid.

Houd altijd uw gewicht naar achteren om te voorkomen dat u naar voren valt of glijdt.

Pak de achterwielleuningen vast en laat ze soepel tussen uw vingers glijden.

De snelheid moet zodanig zijn dat u de rolstoel op elk moment kunt stoppen door simpelweg de rotatie van de leuning met uw handen te blokkeren.



EEN HELLING OPRIJDEN

Een stuk bergopwaarts rijden is zeker niet eenvoudig.

De gebruiker moet het voertuig een zekere snelheid geven door krachtig te duwen op de achterwielleuning en tegelijkertijd de controle over de richting kunnen behouden.

Houd uw gewicht altijd naar voren door naar voren te leunen om te voorkomen dat de rolstoel achterover kantelt.

Pak de achterwielenleuning stevig vast.

Rijd de helling op door de rolstoel met snelle, energieke duwbewegingen op beide achterwielleuning te verplaatsen.

Versnel niet, voer de beweging gestaag en zo soepel mogelijk uit.

Beweeg de romp niet heen en weer.



BELANGRIJK!

Voor degenen die nog niet veel veiligheid hebben verworven bij het besturen van hun rolstoel is het raadzaam om een kantelbeschermingssysteem te monteren dat in deze gevallen handig is om te voorkomen dat de rolstoel tijdens het omhoog rijden achterover kantelt.



VOORZICHTIGHEID!

De maximale helling die de rolstoel veilig kan berijden is 3° (6%).

6.6 ZOEKEN NAAR STABILITEIT

Meerdere keren per dag staat men voor uitdagingen die ertoe leiden dat men uit de rolstoel leunt.



Ogenschijnlijk eenvoudige bewegingen die, indien niet zorgvuldig uitgevoerd, zouden kunnen leiden tot stabiliteitsverlies met het mogelijk kantelen van het voertuig.

Om maximale controle over de rolstoel door de gebruiker te krijgen illustreren we enkele situaties die kunnen optreden tijdens het dagelijks gebruik van het voertuig, waaraan we u vragen om bijzondere aandacht te besteden om altijd het evenwicht en de stabiliteit te behouden.



WAARSCHUWING!

Leun niet te ver naar voren, u zou uit de rolstoel kunnen vallen.

Beweeg niet naar voren door met het bekken over het canvas van de stoel te glijden om objecten te grijpen die te ver weg zijn. U zou uit de rolstoel kunnen vallen.

Leun niet te ver achterover over de rugleuning. De rolstoel kan achterovervallen.

Leun niet te ver opzij, de rolstoel kan dan kantelen

NAAR VOREN UITSTREKKEN

Lijn de voorwielen van de rolstoel naar voren uit.


Rijd hiervoor het voertuig naar voren en weer terug.

Blokkeer de rolstoel met beide parkeerremmen om plotselinge bewegingen van het voertuig tijdens de beweging te voorkomen

Leun zodanig voorover de romp nooit boven de voorwielen uitkomt (als het gewicht te veel naar voren wordt gedragen, kan de rolstoel op de achterwielen komen te staan met mogelijk kantelen van zowel het voertuig als de gebruiker).

Voor meer stabiliteit houdt u zich met uw vrije hand aan de rolstoel vast.

Gebruik de parkeerremmen niet.

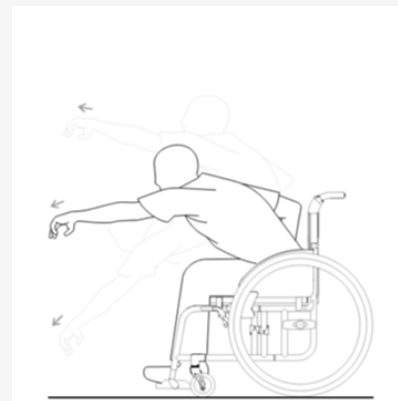

NAAR ACHTEREN UITSTREKKEN

Lijn de voorwielen van de rolstoel naar voren uit.

Rijd hiervoor het voertuig naar voren en weer terug.

Gebruik de parkeerremmen niet.


Leun achterover zonder de zitpositie te veranderen.



ZIJWAARTS UITSTREKKEN

Ga niet met uw romp over het achterwiel heen (de rolstoel kan kantelen).

Houd de rolstoel vast met uw vrije hand voor meer veiligheid en stabiliteit

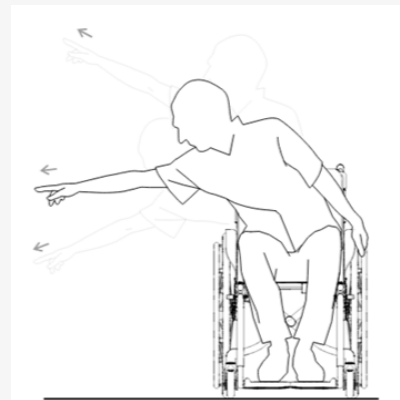

7 VERVOER VAN DE ROLSTOEL

We kunnen zeggen dat er geen uniforme methode is om de rolstoel met de auto (of andere soortgelijke middelen) te vervoeren.

Dit komt doordat deze indicaties in hoge mate afhankelijk zijn van de handicaps van de patiënt (van de mobiliteit van de romp, armen en handen), van fysieke kracht (voor een bejaarde of een kind zal het erg ingewikkeld zijn om volledig autonoom over te stappen), van het type rolstoel en het type voertuig waarmee men de rolstoel wil vervoeren.

Zoals men begrijpt zijn de variabelen te groot om geldige indicaties te geven om aan alle gevallen te voldoen.

Daarom beperken we ons tot advies op algemeen niveau.



WAARSCHUWING!

Voer alle handelingen met betrekking tot het vervoer van de rolstoel met de auto altijd met uiterste voorzichtigheid uit en na nauwkeurige instructies te hebben gekregen van deskundig en gespecialiseerd personeel van onze geautoriseerde detailhandelaars.

Mochten deze operaties riskant of ingewikkeld blijken te zijn, dan is het raadzaam de hulp in te roepen van een begeleider.



VOORZICHTIGHEID!

Vervoer nooit mensen in rolstoelen in de auto (zittend op de rolstoel) als de rolstoel niet is gecertificeerd en voorbereid volgens de vereisten van de norm.

Als dit niet kan worden vermeden, houd er dan rekening mee dat rolstoelen niet zijn uitgerust met veiligheidsgordels en dat eventuele gordels voor autotransport alleen kunnen worden geïnstalleerd door bedrijven die bevoegd zijn om voertuigen om te bouwen.

7.1 VERVOER VAN ROLSTOEL MET PERSOON

Zorg er altijd voor dat de rolstoel geschikt is om de gebruiker in een voertuig te vervoeren.

De symbolen op het productlabel geven aan of de rolstoel een botstest heeft ondergaan en dus kan worden gebruikt voor het vervoeren van de gebruiker in een motorvoertuig.

WAARSCHUWING! Alleen rolstoelen die met dit symbool zijn gemarkeerd zijn geschikt voor het vervoer met een persoon.

7.2 VERVOER MET AANWEZIGHEID VAN EEN BEGELEIDER

Wanneer uw handicap en fysieke kracht het onmogelijk maken om de rolstoel volledig autonoom te verplaatsen en in de auto te laden, is het raadzaam om de hulp van een begeleider in te roepen.

Het gewicht en de inklapbaarheid van de rolstoel zijn belangrijk en essentieel omdat ze de beweging op een eenvoudige manier garanderen, zelfs voor mensen met beperkte fysieke kracht.

Verwijder alle uitneembare onderdelen.

Ontgrendel de parkeerremmen en verwijder de achterwielen.

Klap de rolstoel (zitting en/of rugleuning) op.

Houd de rolstoel met twee handen vast aan twee vaste delen van het frame (om het gewicht te balanceren en het tillen minder vermoeiend te maken).

Laad de rolstoel in de auto.

Laad hierna ook de wielen in.

Gezien het kleine formaat kan de rolstoel in de kofferbak van de auto of op de voorstoel of op de achterbank worden geladen.

Bij grotere transportmiddelen is het mogelijk om de rolstoel in te laden zonder deze te verkleinen.



de afbeeldingen dienen slechts ter illustratie

7.3 VOLLEDIG ZELFSTANDIG DE ROLSTOELEN LADEN

De operaties die worden geïllustreerd zijn uitdrukkelijk bedoeld voor autonome mensen, met een goede controle van de romp, armen, handen en met voldoende kracht om het hele proces in alle veiligheid te laten verlopen.

Benader het instappunt (bijvoorbeeld de bestuurdersstoel) en plaats, na het openen van het autoportier, de rolstoel zo dicht mogelijk bij de autostoel.

Rem de rolstoel met de parkeerremmen en stap over.

Ontgrendel na de overstap de parkeerremmen en verwijder de achterwielen.

Klap de rolstoel (zitting en/of rugleuning) op.

Houd de rolstoel met twee handen vast aan twee vaste delen van het frame (om het gewicht te balanceren en het tillen minder vermoeiend te maken).


Laad de rolstoel in de auto.

Laad hierna ook de wielen in.



de afbeeldingen dienen slechts ter illustratie

8 BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

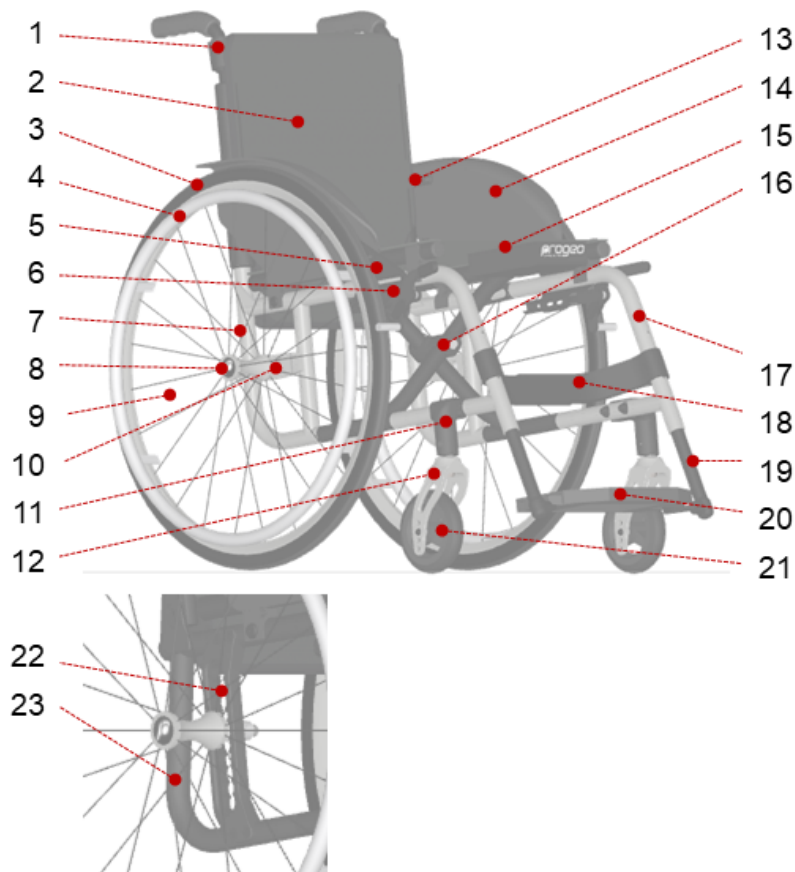

9 VERSTELLINGEN

9.1 ALGEMENE INFORMATIE

De rolstoel Progeo is een medisch hulpmiddel dat is gemaakt op basis van een technisch gegevensblad dat voor de patiënt wordt gebouwd door gekwalificeerd personeel.

Rehateam s.r.l. produceert, test en levert de rolstoel aan de detailhandelaar met de afmetingen en kenmerken die in de technische bestelbon zijn opgegeven.



VOORZICHTIGHEID!

Het wordt afgeraden of zelfs verboden om de rolstoel aan andere gebruikers te geven, zelfs voor korte periodes.

Door de rolstoel aan derden te geven kan het defect raken met niet te voorzien gevolgen, die kunnen leiden tot kantelen van de rolstoel, met ernstige gevolgen voor zowel de rolstoel als de gebruiker.

De rolstoel heeft een structuur en afmetingen die specifiek zijn ontworpen voor de gebruiker die hem koopt, en alleen voor deze gebruiker zijn de stabiliteit, bestuurbaarheid en sterkte gegarandeerd.

Het is verboden om wijzigingen aan de rolstoel aan te brengen (zelfs indien mogelijk) anders dan die bij de vervaardiging



VOORZICHTIGHEID!

Verstellingen mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel dat is geautoriseerd door Rehateam s.r.l.

Verstellingen en/of wijzigingen aangebracht door onbevoegd personeel maken de productgarantie onmiddellijk ongeldig en ontslaan Rehateam s. r. l. van elke aansprakelijkheid voor eventuele storingen en/of schade die aan de verstellingen en/of wijzigingen te wijten zijn.

Voor speciale behoeften of aanpassingen is het altijd nodig om rechtstreeks contact op te nemen met Rehateam s.r.l. en zijn technici om de aanpassingen te evalueren en te verifiëren dat ze het normale veilige gebruik van het voertuig niet in gevaar brengen.

Wijziging aan de parameters en de originele configuraties kunnen de veiligheid van het gebruik van de rolstoel ernstig in gevaar brengen en zowel de rolstoel als de gebruiker schaden.

Controleer aan het einde van elke verstelling aan de rolstoel zorgvuldig of alle onderdelen goed vastzitten (controleer of de schroeven en bouten vastzitten en of de bewegende onderdelen goed werken).

Voer altijd een acceptatietest uit, na elke afstelling, voordat u het voertuig weer normaal gaat gebruiken, zo mogelijk in aanwezigheid van een begeleider of competent persoon

De mogelijke verstellingen voor dit model staan hieronder vermeld

De instructies voor het correct uitvoeren van de verstellingen staan in de betreffende servicehandleiding die beschikbaar is op de website www.rehateamprogeo.com

9.2 MOGELIJKE VERSTELLINGEN

- Hoogte achterzijde
- Hoogte voorzijde
- Trim (balanspunt)
- Hoek vork
- Hoogte rugleuning
- Helling rugleuning (alleen met frame DYNAMIC)
- Afstand voetsteun
- Positie voetsteunplaat
- Helling voetsteunplaat
- Remmen
- Convergentie

10 ACCESSOIRES

10.1 ALGEMENE INFORMATIE

Elk rolstoelmodel kan worden uitgerust met verschillende accessoires die moeten worden beoordeeld naar de behoeften van de gebruiker en/of zijn begeleider.

Sommige foto's in deze handleiding kunnen een ander rolstoelmodel laten zien dan het referentiemodel.

Alle instructies zijn echter relevant, ongeacht verschillen in modellen.

10.2 WIELEN VOOR SMALLE DOORGANGEN

Dit accessoire is nodig wanneer de maximale afmetingen van de rolstoel het passeren van smalle doorgangen (bijv. een deur of lift) verhinderen.


Om dit accessoire te gebruiken moeten de achterwielen worden verwijderd.

Op deze manier wordt zowel in de breedte als in de lengte minder ruimte ingenomen.

Wielen voor smalle doorgangen kunnen ook uit hun steun worden verwijderd door te drukken op de pen **(1)** die ze vergrendeld houdt en de buis uit steun **(2)** te trekken.

Steek om de wielen voor smalle doorgangen in te brengen de buis in steun **(2)** tot de pen **(1)** de steun aanraakt.

Druk vervolgens op de pen en schuif de buis totdat de pen in het gat in de steun vasthaakt.

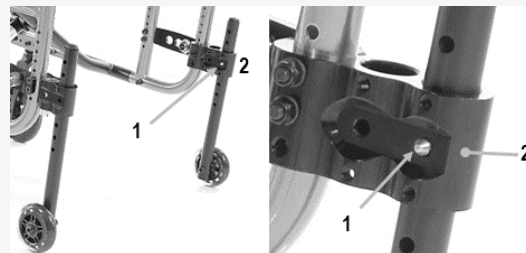



WAARSCHUWING!

Let voor een correcte montage van de transitwielen erop dat bij het plaatsen van de transitwielen in de steun de pen **(1)** altijd naar de binnenkant van de rolstoel gericht moet zijn.

Houd er rekening mee dat bij gebruik van de transitwielen (met ontkoppelde achterwielen) de parkeerremmen geen effect meer hebben.

De stabiliteit van de rolstoel die op wielen voor smalle doorgangen rust is verminderd, let daarom goed op en vraag hulp van een begeleider.

10.3 KANTELBSCHERMINGSWIEL (met stalen steun)

Dit accessoire is ontworpen om te voorkomen dat de rolstoel achterover kantelt.

Voor een goede werking wordt hij bevestigd op een afstand van 2-3 cm van de grond.

Hij kan aan één kant van de rolstoel aanwezig zijn of, voor extra veiligheid, aan beide kanten.

GEBRUIKSSTAND

Pak om de juiste gebruiksstand **(1)** te controleren de buis met één hand vast en probeer deze naar links en rechts te bewegen: de buis mag niet draaien (er kan een kleine speling te voelen zijn).

Druk vervolgens de buis naar beneden: de buis schuift ongeveer 1 cm maar mag niet worden losgelaten.

ROTATIE

Laat om de kantelbescherming **(2)** te draaien deze iets meer dan 1 cm zakken (deel **(3)** van de steun zakt ten opzichte van deel **(4)** zonder te ontkoppelen) en draai hem opzij.



Bij een draai van 180° (tegenovergestelde positie **(8)**) zal de steun automatisch vasthaken (deel **(3)** grijpt in deel **(4)**).

Herhaal de bovenstaande handelingen om de kantelbescherming in de gebruiksstand terug te plaatsen.

VERWIJDEREN/AANBRENGEN

Duw om de kantelbescherming volledig te verwijderen pen **(6)**, aanwezig in het bovenste deel van steun **(6)**, naar voren en duw de buis naar beneden.

Steek om de kantelbescherming vast te haken deel **(7)** van de steun in het gat in deel **(4)** en draai de buis totdat de twee delen correct in elkaar grijpen.

NEUTRAALSTAND

Plaats de kantelbescherming in de neutraalstand (8) wanneer dit nodig is, bijvoorbeeld om treden de beklimmen.



WAARSCHUWING!

Verifieer de werking van het systeem in aanwezigheid van een begeleider.

De rolstoel moet worden opgetild totdat de kantelbescherming de grond raakt en voorkomt dat de rolstoel achterover kantelt.

Doe dit heel voorzichtig.

Controleer of deze correct (in de gebruiksstand) is gemonteerd, voordat u de rolstoel in gebruik neemt.



BELANGRIJK!

Plaats kantelbescherming in de neutraalstand als obstakels of treden overwonnen moeten worden.

10.4 DUWHANDGREPEN VOOR BEGELEIDER

Ze kunnen alleen worden gemonteerd op een rugleuning met buizen zonder handgrepen.

Ze zijn handig als er een begeleider is, omdat ze een betere afstelling hiervan garanderen met als gevolg een verbetering van de grip en positie van de begeleider.

Ze kunnen eenvoudig worden aangepast en verwijderd door de gebruiker/begeleider.

Draai om de hoogte te verstellen hendel **(1)** los, breng de buis op de gewenste hoogte, plaats de handgreep zo dat deze naar achteren wijst en draai hendel **(1)** stevig vast.

De handgreep mag niet onbedoeld draaien.

Draai om de handgreep te verwijderen hendel**(1)** los en verwijder de buis van de steun.

Steek om de handgreep in te brengen de buis in de steun, pas de hoogte aan en zet deze vast zoals hierboven beschreven.




WAARSCHUWING!

Belangrijke opmerking voor de begeleider: de duwhandgreepbuizen zijn alleen veilig als de twee hendels **(1)** stevig vastzitten, dit is namelijk de toestand die het wegglijden of zelfs onbedoeld uitvallen van de buizen voorkomt.

Zorg ervoor dat de twee buizen goed zijn vergrendeld voordat u de rolstoel duwt.

Rehateam s.r.l. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade of letsel als gevolg van het niet naleven van deze waarschuwing.

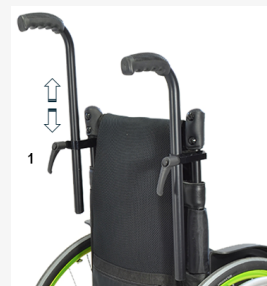

10.5 KANTELHULP


Dit accessoire is ontworpen om de begeleider de mogelijkheid te geven de rolstoel gemakkelijker te besturen, waardoor kleine treden kunnen worden overwonnen.

Druk met uw voet op de plastic steun **(1)** en duw tegelijkertijd met uw armen naar beneden door de handgrepen van de rugleuning **(2)** vast te pakken.

De kantelhulp kan ook uit de houder worden verwijderd door op pen **(4)** te drukken die deze vergrendeld houdt en de buis uit steun **(3)** te trekken.

Steek om de kantelhulp in te brengen de buis in steun **(3)** tot de pen **(4)** de steun aanraakt.

Druk vervolgens op de pen en schuif de buis totdat de pen in het gat in de steun vasthaakt.

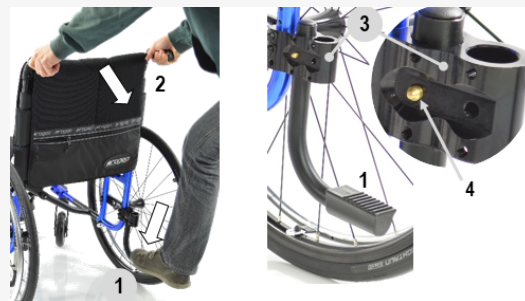

10.6 KRUKKENHOUDER

Met dit accessoire kunnen krukken zo worden vervoerd dat ze bij normaal gebruik van de rolstoel geen obstakel vormen.

Plaats de uiteinden van de krukken in bak **(1)**, maak de bovenkanten met riem **(2)** vast aan de buis van de rugleuning.

De buis met de bak kan gemakkelijk worden verwijderd: druk op pen **(3)** en verwijder de buis van de steun **(4)**.

Steek om de buis met de bak te plaatsen de buis in steun **(4)** totdat de pen **(3)** de steun aanraakt.

Druk vervolgens op de pen en schuif de buis totdat de pen in het gat in de steun vasthaakt.



10.7 OPKLAPBARE HANDGREPEN


Wanneer de handgrepen zijn ingeklapt, worden de afmetingen van de rolstoel verder verkleind en ze gaan weg uit een positie waar ze de armen van de gebruiker mogelijk hinderen tijdens het autonoom duwen van de rolstoel.

In de gebruiksstand **(1)** zijn ze normale duwhandgrepen.

Druk om de handgreep in te klappen op pen **(2)** net onder de handgreep en laat hem zakken **(3)**.

De pen blijft ingedrukt **(2a)**.

Draai om de handgrepen in de gebruiksstand te brengen ze eenvoudigweg omhoog tot pen **(2)** automatisch vasthaakt.

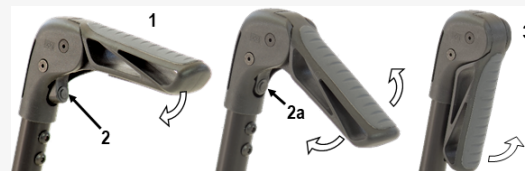

WAARSCHUWING!

Zorg ervoor dat de handgrepen in de gebruiksstand zijn vastgehaakt wanneer ze worden gebruikt om de rolstoel te verplaatsen terwijl de patiënt erop zit.

10.8 TETRACLIP

Dit is een specifieke pen voor de achterwielen die is uitgerust met een ontgrendelingssysteem dat de uitneemhandeling vereenvoudigt voor gebruikers met specifieke mobiliteitsproblemen in de handen.

De pen werkt door de hendel met ring 90° te draaien.

Wanneer het wiel in de bus wordt gestoken, moet de hendel met ring staan zoals weergegeven in figuur **(1)**, d.w.z. 90° gedraaid ten opzichte van de as van de pen.

Draai om het wiel te verwijderen de hendel met ring zodat deze in lijn staat met de as van de pen zoals in figuur **(2)**.

Verwijder vervolgens het wiel.



Om het wiel in te brengen moet de hendel met ring staan zoals weergegeven in figuur **(2)**.

Breng het wiel in en draai de hendel met ring 90° zoals in figuur **(1)**.



WAARSCHUWING!

Het controleren van de achterwielpennen is een van de procedures die de gebruiker regelmatig moet uitvoeren.

Onjuiste plaatsing van de pennen kan tijdens het gebruik loskomen van het achterwiel veroorzaken met als gevolg dat de rolstoel kantelt en mogelijk letsel aan de gebruiker toebrengt

Zie ook hoofdstuk 5.5 *ACHTERWIELEN MET SNELONTKOPPELING*.

10.9 ACHTERWIELTERUGZETPLAAT

Dit accessoire zorgt voor een meer achterwaartse positionering van het achterwiel, wat zorgt voor meer stabiliteit tegen achterover kantelen.

De wielbus wordt in een van de twee gaten **(1)** geplaatst.


EXTRA BUS

Met dit accessoire, dat alleen te combineren is met de "achterwielterugzetplaat", kunnen de achterwielen zonder gereedschap in twee verschillende standen worden gemonteerd.

De bus die vastzet in een van de gaten **(2)** die hoort bij de normale gebruiksstand van de rolstoel waarop ook de remmen zijn afgesteld en, indien aanwezig, de kledingbeschermers zijn gepositioneerd.

De bus die vastzit in een van de twee gaten **(1)** is juist bedoeld voor gebruik wanneer een Handybike aan de rolstoel is bevestigd.

In deze positie werken de parkeerremmen van de rolstoel niet.

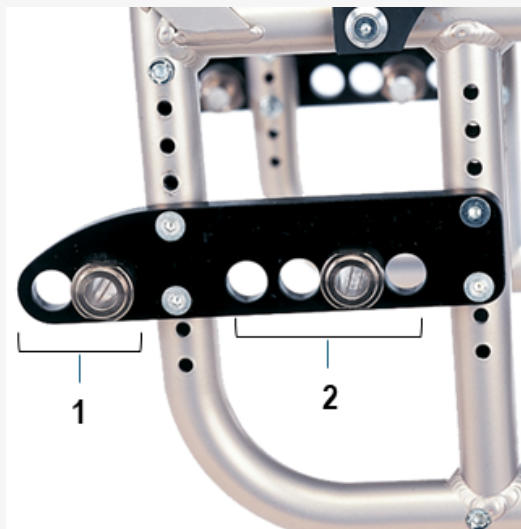

10.10 TAFELTJE

Dit accessoire kan alleen worden gemonteerd in aanwezigheid van armleuningen.

Draai om het tafeltje te plaatsen schroef **(1)** van de steun **(2)** los aan beide zijden van de rolstoel totdat het doorvoergat van de buis volledig vrij is.

Steek de beide buizen **(3)** van het tafeltje parallel in de buizen van de steunen en schuif het tafeltje tot de gewenste diepte.


Draai ten slotte schroef **(1)** van beide steunen **(2)** vast.

Draai om het tafeltje te verwijderen schroef **(1)** van steun **(2)** los aan beide zijden van de rolstoel en schuif het tafeltje eruit.



WAARSCHUWING!

Voordat u het tafeltje gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het stevig vastzit. Probeer het heen en weer te schuiven: als het niet schuift, is het tafeltje gebruiksklaar.

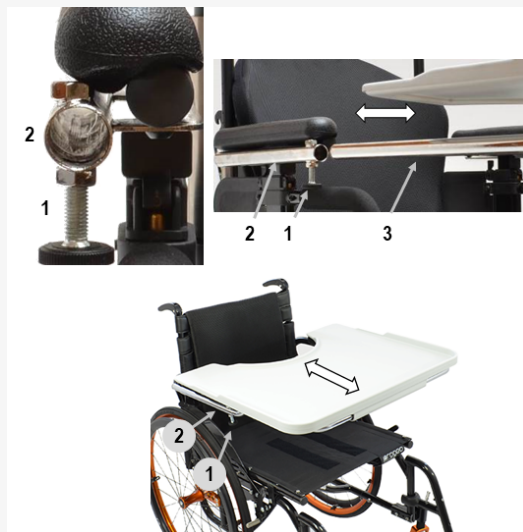

10.11 HEUPRIEM EN HARNASRIEM

Zowel de heupriem als de harnasriem zijn accessoires bij dit model en moeten daarom apart worden aangevraagd.

Beide riemen hebben de taak om de gebruiker meer zitstabiliteit te garanderen.



BELANGRIJK!

De heupriem en de harnasriem zijn veiligheidsvoorzieningen die met name geschikt zijn voor gebruikers met weinig controle over het bovenlichaam die een veiligere verankering aan de rolstoel nodig hebben.



GEVAAR!

Gevaar voor ernstig letsel of verstrengeling

Door een losse riem kan de drager naar beneden glijden en verstrengelingsgevaar optreden.

De positioneringsriem moet worden aangebracht door een ervaren technicus en de voorschrijver moet nagaan of deze geschikt is.

De heupriem kan bij ons netwerk van erkende detailhandelaars worden verkregen.

HEUPRIEM

De heupriem **(1)** bindt het lichaam van de gebruiker aan de rolstoel op heuphoogte, waardoor het bovenlichaam vrij kan bewegen.

De heupriem wordt op twee punten **(2)** aan de achterkant van het frame aan de rolstoel verankerd.

HARNASRIEM



De harnasriem **(3)** bindt de romp van de gebruiker aan de rolstoel door middel van twee bevestigingspunten op heuphoogte en nog twee op schouderhoogte.

De hele romp van de gebruiker wordt geblokkeerd.

Het is met name geschikt voor mensen met een zeer beperkte controle over het bovenlichaam.

De harnasriem is op vier punten aan de rolstoel verankerd, zowel ter hoogte van het achterframe **(2)** als ter hoogte van de handgrepen van de rugleuning **(4)**.

GEBRUIK

Het gebruik van de heupriem en harnasriem is vrij eenvoudig.

Voordat de gebruiker op de rolstoel gaat zitten, moet hij/zij of de begeleider de vergrendelingshaak **(5)** openen door de twee uiteinden opzij te drukken en de twee delen tegelijkertijd uit te schuiven.

Zodra de gebruiker zit en de riem is omgedaan, kan de vergrendelingshaak worden gesloten door het ene deel in het andere te steken.

De beide riemen kunnen versteld worden door aan de banden van heupriem **(6)** of de harnasriem **(7)** te trekken.

Bovendien kan de lengte van de banden ter hoogte van de andere gespen **(8)** worden afgesteld.



WAARSCHUWING!

Controleer altijd of de vergrendelingshaken correct werken en zijn vastgezet, voordat de riemen worden gebruikt.

10.12 ONDERRUGSTEUN

Het is een kussen dat een betere ondersteuning biedt in de onderrug.
Til om de onderrugsteun te positioneren het rugleuningkussen aan de voorkant op.

Bevestig met het aanwezige Velcro de onderrugsteun op het rugleuningkussen
of op de banden op de benodigde hoogte.

Leg ten slotte het rugleuningkussen weg.



10.13 HOOFDSTEUN

Dit accessoire is ontworpen om het hoofd te ondersteunen.

Het is ook ontworpen voor opvouwbare rolstoelen, dit type hoofdsteun heeft namelijk een opvouwbare structuur.

Bij het uitklappen van de rolstoel klemt ook de hoofdsteun uit.

Duw om hem in de juiste gebruiksstand **(1)** te brengen de structuur omhoog zodat de twee staven **(2)** naar beneden staan ten opzichte van het centrale blok **(3)**.

Voordat de rolstoel **(4)** wordt ingeklapt, moet het centrale blok **(3)** van de hoofdsteun naar beneden worden geduwd.

De gebruiker of begeleider kan de positie van de hoofdsteun eenvoudig aanpassen aan de houdingsbehoeften.

Na het losdraaien van knop **(5)** kan de hoogte worden aangepast.

Na het losdraaien van knop **(6)** kan de diepte worden aangepast.

Na het losdraaien van knop **(7)** kan de draaiing van het kussen in 4 richtingen worden versteld



WAARSCHUWING!

Draai aan het einde van elke verstelling de knop weer vast en zorg ervoor dat het systeem stabiel staat

Voer altijd een controle uit, de onstabiliteit van het systeem kan vanwege de losse onderdelen namelijk riskant zijn voor de gebruiker.



BELANGRIJK!

Door de knoppen van de drie verstellingen los te draaien kunnen ook de respectievelijke onderdelen worden verwijderd.



10.14 ZIJWAARTS DUWELEMENT

Dit accessoire is ontworpen om de romp te ondersteunen.

Het zijwaartse duwelement is van het wegzwaaiende type en kan daarom naar achteren worden gedraaid.

Draai hendel (1) 90° en draai het duwelement naar de andere kant waar dit automatisch vasthaakt.



WAARSCHUWING!

Zorg ervoor dat het systeem stabiel is.

Voer altijd een controle uit, de onstabiliteit van het systeem kan vanwege de losse onderdelen namelijk riskant zijn voor de gebruiker



10.15 ACHTERWIELEN

10.15.1 Algemene informatie

Afhankelijk van de functionele of esthetische wensen kunt u in het bestelformulier kiezen uit verschillende achterwielen en verschillende leuning en banden laten monteren.



WAARSCHUWING!

Controleer voor elk type wiel met snelontkoppeling altijd of de snelontkoppelingsspen correct is aangebracht. Zie hoofdstuk

5.5 ACHTERWIELEN MET SNELONTKOPPELING



10.15.2 Wielen Spinergy Flexrim

Dit type wiel heeft een aluminium en flexibele rubberen leuning die de grip aanzienlijk verbetert.

Hier kunnen verschillende banden op worden gemonteerd



10.15.3 Wielen Off-road

Deze wielen zorgen voor een betere soepelheid en comfort op ruw of onverhard terrein.

Ze worden ook aanbevolen als de rolstoel met een voorwielandrijving is uitgerust.

Ze worden alleen geleverd met de speciale band en een aluminium leuning.

Dit type wielen kan worden aangevraagd als een extra (uitwisselbare) set bij de hoofdwielen die in het bestelformulier zijn gekozen.



10.15.4 Wielen Fat-wheel

Deze wielen zorgen dat de rolstoel op moeilijker terrein kan worden gebruikt.

Ze worden ook aanbevolen als de rolstoel met een voorwielandrijving is uitgerust.

Ze worden alleen geleverd met de speciale band en een aluminium leuning.

Dit type wielen kan worden aangevraagd als een extra (uitwisselbare) set bij de hoofdwielen die in het bestelformulier zijn gekozen.



10.15.5 Wielen met enkele geleider

Met dit accessoire kan de gebruiker de geleider verplaatsen en besturen door slechts aan één kant te werken, één wiel is namelijk uitgerust met twee onafhankelijke leuning: de grootste bedient de zijkant van datzelfde wiel, terwijl de kleinere leuning, dankzij stangverbinding **(1)**, het andere wiel bestuurt.

Om de rolstoel in te klappen, moet stang **(1)** worden verwijderd.

Trek hiervoor een van de twee uiteinden van stang naar binnen om hem samen te drukken (er zit een veer in) totdat hij van de wielen kan worden losgemaakt en volledig kan worden verwijderd.

Steek om stang in te brengen een van de twee uiteinden op een wielen en trek vervolgens aan de stang om hem net genoeg samen te drukken om hem in de andere wielen te kunnen steken.



BELANGRIJK!

Controleer regelmatig de sluiting van de twee knoppen **(2)**.

Deze moeten worden vastgedraaid om speling te voorkomen, maar tegelijkertijd om compressie en verlenging van de stang mogelijk te maken.

Deze toestand is ideaal tijdens het rijden en ook voor het inbrengen en uittrekken van de stang **(1)**.



10.15.6 Wielen 22" en 24" met trommelrem

Met dit accessoire kan de begeleider de rolstoel ook afremmen als deze in beweging is.

Hij is erg handig op routes met hellingen waar het moeilijk zou zijn om het voertuig onder controle te houden.

Duw om de remmen te activeren eenvoudigweg de hendel **(1)**, aanwezig in beide duwhandgrepen, omhoog.

Hoe meer druk op de hendel wordt uitgeoefend, des te effectiever zal er worden geremd.

Wanneer de hendels **(1)** worden losgelaten, worden de remmen automatisch vrijgezet.

De trommelrem kan ook dienst doen als parkeerrem.

Houd hendel **(1)** ingedrukt en duw de getande hendel **(2)** naar voren (aanwezig aan de onderkant van de remhendel) en laat tenslotte hendel **(1)** los.

Nu houdt getande hendel **(2)** hendel **(1)** vast en de rem blijft dus geactiveerd.

Druk om de rem vanuit deze positie vrij te geven hendel **(1)** net genoeg om de getande hendel **(2)** te ontgrendelen en laat hem los.



WAARSCHUWING!

Om gecontroleerd te remmen moeten in gelijke mate tegen de beide hendels worden gedruwd.

De twee remmen werken onafhankelijk van elkaar en dus als slechts met één hendel geremd wordt, zwenkt de rolstoel in die richting.

Let daarom buitengewoon goed op bij het afdalen.



10.16 LEUNING

Leuningen met specifieke eigenschappen die een betere grip garanderen, en dus effectiever duwen, zijn beschikbaar en toepasbaar op dit model rolstoel Progeo, ook voor gebruikers met beperkte kracht en mobiliteit in de handen en vingers.

1. Glanzend aluminium
2. Aluminium — gelakt en bekleed met rubber
3. Verchroomd staal
4. Geborsteld titaan
5. Ultra Grepp — hard rubber
6. Max Grepp — zacht rubber
7. Sleepring
8. Siliconen ring die boven de aluminium leuning wordt aangebracht
9. Top Friction — met een strook hard rubber over hele uitwendige omtrek
10. Nova H van aluminium
11. Nova D van aluminium bekleed met hard rubber

OPMERKING: de afbeelding van elke leuning toont een indicatieve tekening van de doorsnede



WAARSCHUWING!

De montage van de leuning kan zodanig zijn dat het risico bestaat dat de vingers tussen de leuning en de wielvelg bekneld raken.

Let altijd goed op.



10.17 BANDEN

Hieronder zijn de verschillende soorten beschikbare banden vermeld.

De compatibiliteit met het achterwiel kan afhangen van de maat van het wiel.

1. Hoge druk glad
Lichtgewicht en betrouwbaar, geschikt voor de meeste omgevingen.
2. Hoge druk kruispatroon
Lichtgewicht en betrouwbaar, meer geschikt voor oneffen oppervlakken.
3. Marathon Plus
Met lekbescherming, geschikt voor de meeste omgevingen.
4. Massieve band
Geschikt voor de meeste omgevingen, hoeft niet opgeblazen te worden, maar is iets minder glad, heeft iets minder grip, vooral op gladde, vochtige vloeren en het absorbeert minder trillingen van het rollen op oneffen ondergrond.



10.18 SPAKENBEDEKKING

Hebben vooral een esthetische en beschermende functie doordat ze voorkomen dat er vingers tussen de spaken van het achterwiel komen.

1. Colour
2. Dragon
3. Zwart
4. Transparant



10.19 VOORWIELEN

Op basis van de omgevingen waarin de rolstoel wordt gebruikt kunt u het type en de maat voorwielen kiezen die beschikbaar zijn voor dit model.

In het algemeen kan worden gesteld dat hoe groter de diameter en breedte van het wiel, hoe gemakkelijker het zal zijn om oneffen terrein en kleine obstakels zoals stenen, kleine hoogteverschillen (1 cm) enz. te overwinnen.

Het zachte wiel is comfortabeler maar minder soepel dan het harde wiel.

Het pneumatische wiel is het comfortabelst, maar moet worden opgeblazen.

Het harde wiel absorbeert minder roltrillingen op oneffen ondergrond.

1. 3" Sport – 80x24
2. 3" Active Soft — 80x34
3. 4" Soft – 100x32
4. 4" Active Sport– 100x21
5. 4" Active Soft– 100x32
6. 5" Soft — 125x27
7. 5" Active Soft— 125x34
8. 5" Opblaasbaar — 127x26
9. 6" Soft — 150x32
10. 6" Opblaasbaar — 150x32
11. 7" Soft — 175x40



WAARSCHUWING!

Controleer altijd of de zwenkende voorwielen niet met andere delen van de rolstoel in aanraking komen, voordat de rolstoel in gebruik wordt genomen.

Controleer regelmatig of de voorwielen correct zijn bevestigd.



10.20 VASTBINDFLAP

Met dit accessoire kan men het rugleuningkussen verbinden met de stoelbekleding, wat handig is om te voorkomen dat een kussen dat niet goed aan de stoel is bevestigd naar achteren schuift.

Het aanbrengen van deze flap is vrij eenvoudig, met het aanwezige harde Velcro is het voldoende om deze te bevestigen aan het binnenste deel van de vulling en aan het zachte Velcro van de stoelbekleding.



10.21 AFNEEMBARE TAS

Dit accessoire is erg handig om voorwerpen om mee te nemen, zowel bij gebruik van de rolstoel als in situaties daarbuiten.

De tas is gemakkelijk afneembaar dankzij de steun die aan de rolstoel is bevestigd.


Afhankelijk van de beschikbare ruimte kan de tas naar achteren **(1)** of naar voren **(2)** worden gedraaid; hij is normaal gesproken bevestigd aan de voorkant van de rolstoel.

Draai om de tas te verwijderen aan knop **(3)** vanuit de gesloten positie **(4)** totdat groef **(5)** vrijkomt.

De hendel **(3a)** van de knop kan in verschillende standen staan, er is namelijk meer dan één gesloten stand.

Trek zodra groef **(5)** vrij is de tas omhoog om deze te verwijderen **(6)**.

Steek om de tas te bevestigen steun **(7)** in langs groef **(5)** en draai tenslotte de knop **(3)** naar een gesloten positie **(4)** zoals hierboven aangegeven.

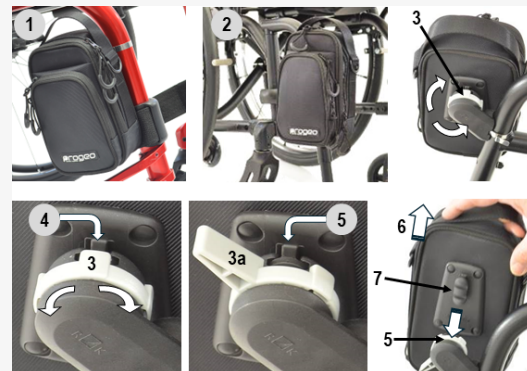

10.22 STOOTKUSSEN

Dit accessoire is erg handig om het frame te beschermen tegen eventuele stoten.

Het aanbrengen van dit kussen is vrij eenvoudig, het is namelijk voldoende om deze om het frame te wikkelen en te sluiten met banden van Velcro.



11 ONDERHOUD

De rolstoel heeft een voorziene en met voorzichtigheid beoordeelde levensduur van 5 jaar.

Een periodieke controle van uw rolstoel is essentieel om altijd maximale efficiëntie en duurzaamheid te garanderen.

Nauwgezette controles, regelmatig herhaald, en een juist gebruik van de rolstoel zullen de levensduur van de rolstoel met vele jaren verlengen.

Voor het reinigen van de aluminium of koolstofvezel onderdelen (frame, leuning, remmen, enz.), het rugleuningkussen en de stoel is het aanbevolen om alleen een zachte, vochtige doek te gebruiken.



WAARSCHUWING!

Ga binnen 6 maanden na aankoop van de rolstoel naar uw erkende detailhandelaar voor een algemene controle.

Het niet controleren van de rolstoel maakt de garantie onmiddellijk ongeldig en ontslaat het bedrijf van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit mogelijke defecten of breuken.



WAARSCHUWING!

Bijzondere aandacht wordt aanbevolen bij het reinigen van de leuningen (duwringen) van de achterwielen, die makkelijk vuil en stoffig worden door het constante contact met de handen en de nabijheid van de grond

Een goede reiniging van de leuningen garandeert een betere grip en dus veiliger rijden.



VOORZICHTIGHEID!

Gebruik voor het reinigen geen schuurmiddelen of ontvettingsmiddelen die de onderdelen kunnen beschadigen.



WAARSCHUWING!

Zand, zeewater, chloorhoudend water of andere agressieve middelen kunnen lagers, schroeven, bouten of andere bewegende onderdelen beschadigen.

Het is raadzaam om nooit in contact te komen met de hierboven genoemde agressieve omgevingen, en als dit gebeurt moet er zorgvuldig worden gewassen en gereinigd.

De garantie is niet aansprakelijk voor geoxideerde onderdelen en schade veroorzaakt door onachtzaamheid aan het product.



WAARSCHUWING!

Draai alle geschroefde onderdelen goed vast en vervang de zelfborgende moeren na veelvuldig gebruik.

Door ze regelmatig vast te draaien verliezen ze namelijk geleidelijk hun effect.



WAARSCHUWING!

Laat een algehele controle van de rolstoel uitvoeren (minstens eenmaal per 3 maanden) door gekwalificeerd personeel dat bevoegd is om PROGEO-producten te onderhouden.

Voor elke vraag en elk probleem met betrekking tot de aanpassing en het onderhoud van Progeo-rolstoelen stelt het technisch personeel van Rehateam s.r.l. zijn ervaring en advies ter beschikking aan alle klanten, via gekwalificeerd personeel dat bereid is om elk verzoek op te lossen.

Het is mogelijk om tijdens kantooruren direct contact met ons op te nemen op het volgende adres: Rehateam s.r.l., Vicolo Negrelli 5, 31038 Castagnole di Paese TV, Italia, tel. 0039 0422 484657, mail: info_it@permobil.com

11.1 VERVANGING VAN AAN SLIJTAGE ONDERHEVIGE ONDERDELEN

Elke rolstoel heeft, bij constant gebruik, naast onderhoud ook "buitengewone" ingrepen nodig door normale slijtage van de onderdelen.

Deze handelingen zijn strikt gekoppeld aan de duur en de vorm van het gebruik (bijv. gebruik op losse en hobbelige ondergrond, in zoute omgevingen, enz.).

11.1.1 Reparatie van een band

Verwijder in het geval van een lekke band het wiel en de buitenband van de velg met behulp van speciale bandenwippers (zoals die bij fietsen worden gebruikt).

Verwijder de binnenband en repareer deze met speciale plakkers die commercieel beschikbaar zijn.

Vervang de binnenband als reparatie niet mogelijk is.

De achterafdekkingen tegen lekrijden kunnen worden vervangen als er overmatige of onregelmatige slijtage wordt geconstateerd, wat de soepelheid en de bestuurbaarheid van de rolstoel zou kunnen verminderen.

Om een band terug op te leggen moet er lucht in de binnenband worden gepompt. Steek het opblaasventiel door het daarvoor bestemde gat op de velg.

Gebruik beide handen en gebruik specifieke sleutels (zoals die bij fietsen) om de binnenband en de band in de velg te leggen, en zorg ervoor dat alle onderdelen juist zitten.

Let er tijdens deze handeling op dat de binnenband niet bekneld raakt.

Pomp de band op tot de juiste spanning.

Massieve banden moeten worden vervangen wanneer ze zijn opgebruikt.

11.1.2 Reserveonderdelen

Voor vervanging wegens slijtage of breuk (of simpelweg voor de aankoop van nieuwe accessoires) zijn alle reserveonderdelen beschikbaar zijn die nodig zijn om uw rolstoel in goede staat te houden.



BELANGRIJK!

Alle reserveonderdelen kunnen worden aangevraagd bij onze geautoriseerde centra.

Na de vervanging van onderdelen kan een afstelling vereist zijn.

11.2 CONTROLE VAN DE ONDERDELEN

Voor een dagelijkse controle raden we altijd aan om te controleren:

- De bandenspanning
- De snelontkoppelingsspennen
- Het uitklappen van de rolstoel (zitting en/of rugleuning)
- De voetsteun
- De parkeerremmen
- Alle vastgeschroefde onderdelen
- De staat van alle aan slijtage onderhevige onderdelen

11.3 DESINFECTIE EN HERGEBRUIK VAN DE ROLSTOEL

Tijdens het gebruik van de rolstoel moeten alle oppervlakken die in contact komen met de gebruiker regelmatig, of wanneer noodzakelijk, worden behandeld met een desinfecterende spray.

Een veilige desinfectie van de naden is normaal gesproken niet te garanderen.

Daarom raden we aan om de hoes van de zitting en rugleuning te vervangen en op de juiste manier weg te gooien in geval van bacteriële besmetting, in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Bij hergebruik van de rolstoel dient dezelfde soort behandeling zeer zorgvuldig te worden uitgevoerd alvorens de rolstoel te hergebruiken.



WAARSCHUWING!

Het eerste dat u moet weten, is dat schoonmaken niet hetzelfde is als desinfecteren.

Door te reinigen verwijdert men ziektekiemen en vuil van oppervlakken, maar men doodt geen ziektekiemen, hoewel het verwijderen ervan de hoeveelheid en het risico op verspreiding van infecties verkleint.

Bij een desinfectie daarentegen doodt men micro-organismen zoals bacteriën door middel van chemicaliën.

Dit proces reinigt vuile oppervlakken niet noodzakelijkerwijs, maar door ziektekiemen op het oppervlak te doden kan het risico op verspreiding van de infectie verder worden verkleind.

Met dit in gedachten is het juiste proces dat u met de rolstoel moet volgen eerst een gewone reiniging en vervolgens desinfectie uit te voeren met behulp van een desinfectiemiddel voor sanitaire oppervlakken

Deze producten zijn bacteriedodend en virusdodend.

U kunt meer informatie over deze producten vinden op de website van het Ministerie van Volksgezondheid of andere betrouwbare bronnen

We raden u ook aan om de instructies van de fabrikant zorgvuldig te lezen voor correct gebruik en desinfectie en om mogelijke contra-indicaties te vermijden.

11.4 LANGDURIGE OPSLAG

In het geval dat de rolstoel gedurende een middellange periode (langer dan 4 maanden) niet wordt gebruikt, wordt aanbevolen deze schoon op te bergen op een droge en overdekte plaats en in een doos (bij voorkeur die van de originele verpakking).

Bij weer in gebruik nemen is het noodzakelijk om een algemene controle van de rolstoel uit te voeren volgens dezelfde punten als in paragraaf 11.2 *CONTROLE VAN DE ONDERDELEN*

Voer voordat u de patiënt de rolstoel laat gebruiken rolstoelrijtests uit om te controleren of er geen afwijkingen zijn.

Raadpleeg bij storingen, afwijkingen of kapotte onderdelen een erkende detailhandelaar voor de nodige reparatie.

11.5 VERWIJDERING/RECYCLING VAN DE ONDERDELEN



Als de rolstoel moet worden weggegooid (einde levensduur van het product), is het noodzakelijk om rekening te houden met de plaatselijke voorschriften voor afvalverwijdering of recycling.

Dit omvat het reinigen of desinfecteren van de rolstoel voordat u deze weggooit.

Hieronder staat een beschrijving van de gebruikte materialen.

- Aluminium: frame, vorken, wielen, rugleuningbuizen, voetsteunbuizen
- Titanium: frame, rugleuningbuizen

- Staal: bevestigingsschroeven, snelontkoppelingspennen
- Kunststof: voetsteunen, kledingbeschermers
- Rubber/PU: knoppen, wielafdekkingen voor en achter
- Koolstofvezel: kledingbeschermers, voetsteunen
- Bekleding: stof met schuimrubber.
- Verpakking: luchtkussenfolie van polyethyleen, karton.

Neem voor verwijdering of recycling contact op met een erkend afvalverwerkingscentrum.

Als alternatief kan de rolstoel worden teruggebracht naar de detailhandelaar voor verwijdering.



WAARSCHUWING!

Let bij verwijdering op gebroken of beschadigde onderdelen die een mogelijk snij- of beknellingsletsel kunnen veroorzaken.

Het wordt aanbevolen om geschikte beschermingen te gebruiken.

12 OPLOSSINGEN VOOR MOGELIJKE PROBLEMEN

Bij constant en langdurig gebruik van de rolstoel, of na het verstellen van enkele onderdelen, kunnen er "defecten" optreden die vrij gemakkelijk kunnen worden verholpen door gekwalificeerd personeel of, in sommige gevallen, gemarkeerd in de tabel met het symbool ■, zelfs door de gebruiker of diens begeleider. We raden u in ieder geval aan om contact op te nemen met de geautoriseerde detailhandelaar van Rehateam s.r.l.

Optredend probleem	Reden voor het probleem	Oplossing	
De rolstoel rijdt niet rechtdoor.	De voorvork staat niet loodrecht op de grond.	Verstel de hoek van de vork	
	De twee voorwielen zijn verschillend in hoogte versteld.	Verstel de hoogte van de voorwielen	
	De bandenspanning is niet juist en/of verschillend van elkaar.	Pomp de banden op tot dezelfde, juiste spanning.	■
	Enkele spaken op het achterwiel zijn gebroken of zitten los.	Vervang beschadigde spaken of draai te losse spaken vast.	
	De voorwiellagers zijn vuil of beschadigd.	Reinig de voorwiellagers.	■
		Vervang de voorwiellagers.	
De rolstoel heft zich te gemakkelijk op	De achterwielen zijn versteld voor een te actieve trim.	Zet indien mogelijk de achterwielen verder naar achteren.	
	De rolstoel helt te veel	Verhoog de achterkant of verlaag de voorkant.	
De parkeerremmen werken niet goed	De bandenspanning is niet juist.	Controleer de bandenspanning.	■
	De remmen zijn slecht afgesteld.	Stel de remmen correct af.	
Overmatige rolweerstand	De bandenspanning is niet juist.	Controleer de bandenspanning.	■
	De buitenbanden zijn erg versleten	Vervang de buitenbanden.	■
De rolstoel klappt te moeilijk uit	De rugleuningbanden zijn te strak.	Maak de rugleuningbanden losser.	■

13 TECHNISCHE GEGEVENS

- **ZITTINGBREEDTE** 330; 360; 390; 420; 450; 480 mm
- **ZITTINGDIEPTE** 350; 375; 400; 425; 450; 475 mm
- **AFSTAND VOETSTEUN** 320 tot 510 mm (*verstelbaar*)
- **HOOGTE RUGLEUNING** 300 tot 540 mm (*verstelbaar*)
- **HOEK RUGLEUNING** standaardframe: 90° ; frame Dynamic: 81° tot 99° (*verstelbaar*)
- **CAMBER** standaardframe: 0°; 1,5°; 3°; frameDynamic: 0°; 1,5°; 2°; 4°
- **HOOGTE VOORZIJD** 410 tot 560 mm (*verstelbaar*)
- **HOOGTE ACHTERZIJD** 380 tot 510 mm (*verstelbaar*)
- **TRIM (balanspunt)** standaardframe: 35; 60; 85; 100 mm (*verstelbaar*); frame Dynamic: 35; 55; 75; 95 mm (*verstelbaar*)
- **HOEK VOORFRAME** 100°; 110°
- **TOTALE BREEDTE** zittingbreedte + 170 mm (*met camber 0°*)
- **TOTALE LENGTE (std conf.)** 900 mm circa
- **GEWICHT ROLSTOEL (lichtste conf.)** vanaf 10,0 kg circa
- **GEWICHT ZONDER VERWIJDERBARE DELEN (lichtste conf.)** vanaf 7,4 kg circa (*zonder achterwielen*)
- **GEWICHT PAAR STANDAARD ACHTERWIELEN** 3,2 kg circa
- **GEWICHT PAAR ARMLEUNINGEN** 1,0 tot 2,8 kg circa
- **MAXIMALE BELASTING** 125 kg
- **MINIMAAL RUIMTEBESLAG (ingeklapte rolstoel)** 260 mm (*met camber 0°*)

14 GARANTIE

Alleen de geautoriseerde distributeur/detailhandelaar kan de garantierechten jegens Rehateam s.r.l. doen gelden, daarom heeft de klant niet het recht om er gebruik van te maken (deze garantievoorwaarden zijn daarom alleen ter informatie).

Algemene garantievoorwaarden

Rehateam s.r.l. verleent assistentie bij zijn producten zolang er sprake is van correct gebruik en adequaat onderhoud van alle onderdelen van de rolstoel. De garantie dekt elke materiaal- en fabricagefout mits wordt aangetoond dat een dergelijk defect is veroorzaakt vóór levering aan de geautoriseerde distributeur/detailhandelaar.

Gebruik maken van garantierechten

Om van alle garantierechten (op al onze producten) te kunnen genieten, is het noodzakelijk dat de geautoriseerde distributeur/detailhandelaar binnen 7 dagen na de leveringsdatum een controle uitvoert op de ontvangen producten om de eventuele fabricagefouten vast te stellen, en ten tweede dat als een fabricagefout wordt gevonden, dit onmiddellijk schriftelijk wordt gemeld aan Rehateam s.r.l.

Alle gebreken die ondanks de nauwgezette controle pas na het verstrijken van de hierboven aangegeven periode worden vastgesteld, moeten ook schriftelijk worden gemeld aan Rehateam s.r.l..

Garantiedekkingstermijn

Rehateam s.r.l. geeft 5 jaar jaar garantie op dit model rolstoel op het frame, 2 jaar op alle andere onderdelen en accessoires vanaf de leverdatum, met uitzondering van die onderdelen die bij normaal gebruik aan natuurlijke slijtage onderhevig zijn.

Reparatie van defecten of vervanging

De garantie op de defecten van contactonderdelen wordt gedekt naar goeddunken van Rehateam s.r.l., hetzij door de reparatie van het defect, hetzij door de volledige vervanging van het onderdeel. De geautoriseerde distributeur/detailhandelaar kan bij eenvoudige ingrepen autonoom handelen door het defect te verhelpen of het specifieke geval onder de aandacht van Rehateam s.r.l. te brengen. Bij onze productserie die wordt aangeduid door de merken Progeo en Physio worden kleine onvolkomenheden, kleine onnauwkeurigheden in de kleuren en texturen van het koolstofvezel niet beschouwd als gebreken, aangezien de vervaardiging van deze producten op maat gebeurt, met artisanale en niet-industriële processen.

Garantielimiet

De garantie dekt geen bijkomende kosten (bijv. voor reparatie, verpakking, uitgaven voor werkuren van het personeel, diverse uitgaven, enz.).

Van de garantie zijn uitgesloten:

- Transportschade die niet direct is meegedeeld aan de verzender op het moment van bezorging.
- Reparaties uitgevoerd door niet-geautoriseerde centra en personeel.
- Aan slijtage onderhevige onderdelen — informeer bij uw distributeur/detailhandelaar naar de lijst van deze onderdelen.
- Schade veroorzaakt aan objecten of mensen tijdens het gebruik van onze producten.
- Schade veroorzaakt door opzet of schuld van de koper, of door verkeerd en oneigenlijk gebruik van de rolstoel.

- Schade aan het voertuig, eigendommen en personen als gevolg van het gebruik van een apparaat, accessoire of object dat aan de rolstoel is gemonteerd/toegevoegd zonder de schriftelijke toestemming van Rehateam s.r.l.

Alle aanspraken op schadevergoeding die niet specifiek genoemd zijn in de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk zijn uitgesloten van de garantie.

Rehateam s.r.l. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het niet respecteren en niet naleven van de indicaties uiteengezet in de individuele contracten, indien de volgende omstandigheden het onmogelijk hebben gemaakt om te voldoen aan de voorwaarden van het contract: embargo's, import- en exportverboden van contractproducten, wettelijke voorschriften, stakingen en uitsluitingen, tekort aan grondstoffen, ongevallen of andere overmacht.

Rehateam s.r.l. is niet verplicht om wijzigingen van technische aard aan haar producten, die onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen en updates indien dit nodig wordt geacht, door te geven.

15 GARANTIECERTIFICAAT



REHATEAM s.r.l.



Vicolo Negrelli 5 — 31038 Castagnole di Paese (TV) — Italië



0039 0422 484657



0039 0422 484661



info@rehateamprogeo.com



www.rehateamprogeo.com

DISTRIBUTEUR/DETAILHANDELAAR

Stempel

Leverdatum aan de klant:

90 - GARANTIECERTIFICAAT

MEDISCH HULPMIDDEL
KLASSE I



productetiket

permobil

nld-NL



www.permobil.com